



Fixierfließ


Mefix ist ideal für die Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen.

Längenmarkierte Schutzfolie

- Einfach zu entfernen zum wirtschaftlichen Zuschneiden

Wellenförmig perforierte Schutzfolie

- Ermöglicht ein einfaches Handling

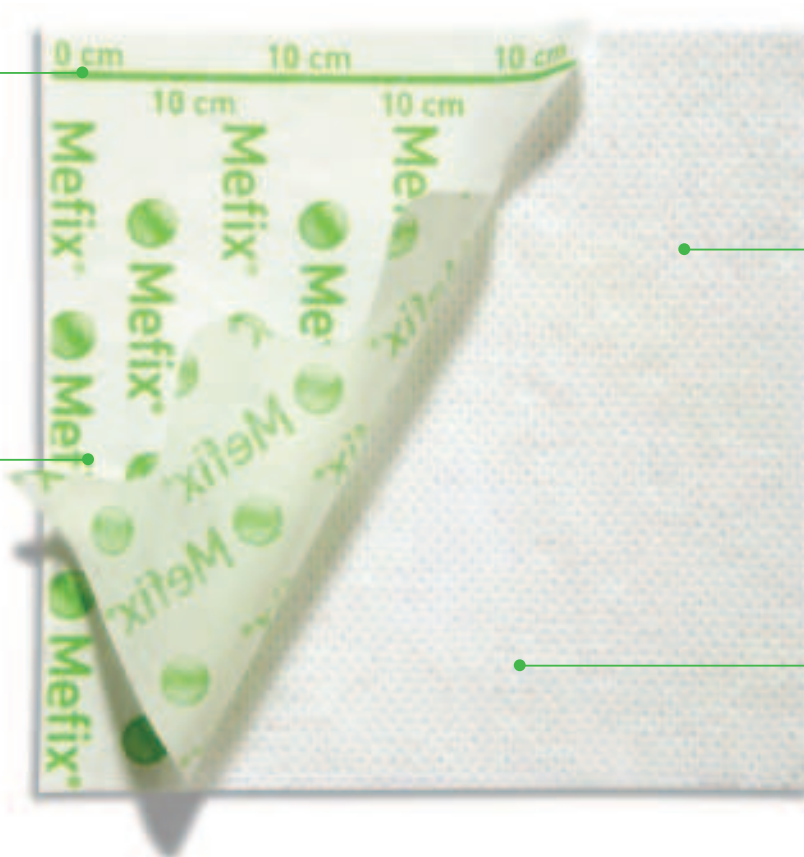

Polyacrylatkleber

- Hautfreundlich
 - Bindemittelfrei
 - Auf Wasser-Emulsionsbasis

Vlies aus Sontara Polyester

- Weiches, elastisches, nichtabsorbierendes Vlies

Eigenschaften von Mefix

Die poröse Struktur des Sontara Vliesstoffes stellt die Luft- und Wasserdurchlässigkeit sicher. Das Material ist dehnbar, anschmiegsam und erlaubt Körperbewegungen. Außerdem ist es nichtabsorbierend und verhindert so ein Durchnässen. Der Polyacrylatkleber gewährleistet ein sanftes Kleben und gleichzeitig eine sichere Haftung. Die Schutzfolie ist in 10 cm Abständen markiert und wellenförmig perforiert für einfaches und sicheres

Entfernen und Applizieren. Mefix kann auf die gewünschte Form und Größe zugeschnitten werden.

Anwendungsgebiete

Mefix kann unter anderem für die Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen eingesetzt werden. Mefix ist die ideale Fixierung im Nacken-, Ellbogen- und Kniebereich.

Anwendungshinweise

Schneiden Sie den Verband auf die gewünschte Größe zu. Trennen Sie die beiden Streifen des Schutzpapiers in dem Sie den Verband leicht quer dehnen.



Entfernen Sie zuerst den schmalen Streifen der Schutzfolie.



Applizieren Sie nun den Teil mit dem freigelegten Kleber auf die Haut. Entfernen Sie das restliche Schutzpapier. Bitte beachten Sie, dass Sie Mefix während der Applikation nicht überdehnen.

Die einzigartige, wellenförmig perforierte Schutzfolie erleichtert die Fixierung und macht das Arbeiten mit Handschuhen schnell und problemlos.

Vorteile von Mefix:

- Hautfreundlicher Kleber auf Wasser-Emulsionsbasis
- Längenmarkierte Schutzfolie für einfaches Abmessen und Zuschneiden
- Kann an bewegungsreichen Körperstellen appliziert werden
- Luftdurchlässig

Bitte beachten:

Mefix soll nicht unter Spannung angebracht werden. Scherkräfte können eine Verletzung der Haut zur Folge haben. Dies ist besonders wichtig bei der Applikation auf Gelenken.

Mefix ist unsteril in 10 Meter Rollen erhältlich.



Art. Nr.	Breite cm	PZN Stück	PZN Packung	Stück Packung	Stück Karton
310250	2,5	-	30 42 795	1	39*
310500	5	-	30 42 803	1	20
311000	10	-	30 42 826	1	20**
311500	15	-	30 42 832	1	20**
311090	10	-	45 18 142	1	30***
311590	15	-	45 18 159	1	22***
312000	20	-	30 42 849	1	10
313000	30	-	30 42 855	1	10

* Bei diesem Artikel ist die Schutzfolie nicht perforiert.

** Krankenhaus Sortiment

*** Home Care Sortiment (11 Meter Rollen)

Verbandmittel sind CE geprüfte Medizinprodukte und keine Arzneimittel! Verbandmittel sind weiterhin verordnungsfähig.

Mölnlycke Health Care GmbH
Max-Planck-Str. 15 · 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
Postfach 3265 · 40682 Erkrath-Untersfeldhaus
Tel.: 0211/92088-0 · Fax: 0211/92088-170
www.molnlycke.com



Mefix ist eine eingetragene Marke der Mölnlycke Health Care GmbH.