


# Gebrauchsanweisung Moorkissen

**22 x 40cm**

Art.-Nr. 40191


PZN 02246219

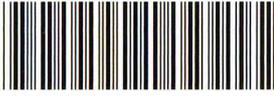

**30 x 40cm**

Art.-Nr. 40192

PZN 02247928

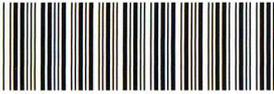

**Hals / Nacken 20 x 50cm**

Art.-Nr. 40193

PZN 02245415



Moorkissen sind nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt und können in folgenden Anwendungsgebieten eingesetzt werden:

**Rheumatische Schmerzen, Rückenschmerzen, als Bettwärmekissen und Verspannungen**

Zu näheren Erläuterungen zur Wärmetherapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Mikrowellenerwärmung

Da die Leistung der verschiedenen Mikrowellen bei der gleicher Leistungsangabe unterschiedlich ausfallen kann, empfehlen wir eine sukzessive Überprüfung der optimalen Aufwärmzeit.

Legen Sie das Moorkissen in die Mikrowelle (600 Watt) und stellen Sie das Gerät zunächst auf 1 Minute ein. Das Moorkissen herausnehmen und gut durchkneten, so daß eine gleichmäßige Verteilung der Wärme gewährleistet ist. Wiederholen Sie den Vorgang in 30 Sekunden Intervallen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

#### Wasserbaderwärmung

Im Wasserbad (80°C) ca. 7 Minuten erhitzen. Testen Sie die gewünschte Temperatur des Moorkissens durch Aufwärmen in 1 Minute Intervallen. Nicht kochen! Die Aufwärmzeit ist von der Größe des Moorkissens abhängig.

Um mögliche Hitzereaktionen der Haut zu vermeiden, wickeln Sie das erwärmte Moorkissen in ein Tuch ein.

#### Pflegehinweise

Bei Verschmutzung kann das Moorkissen unter fließendem Wasser bei max. 30°C gereinigt werden. Bei der Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln wird die Oberfläche beschädigt.

#### Sicherheitshinweise

Nicht im Backofen oder Grill erwärmen! Vorsicht! Überhitzung kann das Moorkissen zerstören! Undichte oder entleerte Moorkissen dürfen nicht mehr erwärmt und gebraucht werden!

Die Moorkissen sind kein Spielzeug und sind nicht zum Verzehr geeignet. Das Produkt muss vor jeder Anwendung auf äußerliche Schäden kontrolliert werden. Benutzen Sie keine defekten Produkte! Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen, NICHT ÄTZENDEN Reinigungsmitteln.

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.dr-junghans.de/de/information/downloads](http://www.dr-junghans.de/de/information/downloads)

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Gefahrenhinweise vor der Anwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung auf.

CE  **Dr. JUNGHANS**<sup>®</sup>  
MEDICAL-PRODUKTE • BABYARTIKEL

Käthe-Kollwitz-Straße 34 | 04651 Bad Lausick | TEL 034345/5601-0 | FAX 034345/5601-99 | [www.dr-junghans.de](http://www.dr-junghans.de) | [info@dr-junghans.de](mailto:info@dr-junghans.de)

## MOORKISSEN

Moorkissen sind mit „Heilmoor“ gefüllte natürliche Wärmekissen, die eine größere Wärme-retentionskapazität enthalten.

 **Dr. JUNGHANS**<sup>®</sup>  
MEDICAL-PRODUKTE • BABYARTIKEL