



Moorkissen Rücken/Brust (38 x 25 cm)

PZN 043 849 02

1 Stück

Moorkissen für Wärme- und Kältetherapie, auch als Temperaturspender.

Füllung:

Original Altteicher Moor in Spezial-Weichfolie für medizinische Zwecke, frei von Schwermetallen und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen, physikalisch unbedenklich nach EN 71 Teil 3

Anwendung:

Wärmetherapie unterstützt erfolgreich die Behandlung von Verspannungen, Rückenschmerzen, Ischias, Kopfschmerzen, Migräne, Hexenschuss, Ohrenscherzen, Magen- und Nierenschmerzen, Monatsbeschwerden, rheumatischen Beschwerden und Erkältungskrankheiten.

Zum Erwärmen des Moorkissens kann ein Wasserbad oder die Mikrowelle dienen:

Wasserbad: 10-15 Minuten im heißen Wasser, Topf dabei unbedingt von der Kochstelle nehmen

Mikrowelle: 2 Minuten bei 360 Watt

Die optimale Behandlungstemperatur liegt zwischen 38 und 55 °C. Die Temperatur des Moores fällt nicht unter die Körpertemperatur und somit wird die behagliche Wärme langanhaltend vom Kissen ausgestrahlt. Das Moorkissen wird auf die zu behandelnde Körperpartie gelegt, wobei bei höheren Temperaturen über 45°C die Anwendung im Tuch empfohlen wird!

Kältetherapie unterstützt die Heilung bei Frakturen, Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Migräne u. a. Schmerzen, Traumata sowie akut entzündlichen Gelenkprozessen, z. B. bei Gicht oder speziell rheumatischen Beschwerden. Das Moorkissen wird zum Kühlen im Kühlschranks (nicht ins Tiefkühlfach) vorbereitet und dann auf die zu behandelnde Körperpartie gelegt. Die Kissen eignen sich auch hervorragend als Wärme- oder Kältespeicher für Campingboxen oder als Unterlage im Bett und Kinderwagen.



Zusätzliche Informationen zu diesem oder weiteren Produkten erhalten Sie auch unter:

Allpharm Vertriebs-GmbH · Langgasse 63 · 64409 Messel · Tel. +49 (0) 61 59 - 71 70 - 0 · Fax +49 (0) 61 59 - 71 70 - 10 · eMail: info@allpharm.de · Internet: www.allpharm.de