

OXYD®



Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
Oxyal® Augentropfen werden angewandt zur Befeuchtung der Augoberfläche sowie zur Linderung der Symptome des Trockenen Auges. Kann sich z. B. durch das Gefühl von geröteten Augen äußern. Oxyal® enthält Hyaluronsäure. Hyaluronsäure im natürlichen Tränenfilm vor und ist für eine gute Sehschärfe. Eignung auch bei Kontaktlinsen. In Kombination mit dem GP 8000 befeuchtet Oxyal® die Augoberfläche besonders nach hohem Belastungsgrad der Lider auf dem Auge. Die wichtigen Elektrolyten (Magnesium, Natrium und Kalzium) und die hypotonische Lösung tragen zum Abklingen der Beschwerden des trockenen Auges bei. Wiederholt Anwendung des pharmakologischen osmotischen Gärungsmitte Augoberfläche. Oxyal® enthält ein innovatives Konservierungsmittel Auge in die natürlichen Bestandteile des Tränenstoffwechsels einfließen lassen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder gern auch an Dr. Winzer Pharma wünscht Ihnen und Ihre Augen alle

Welche Packungsgrößen sind erhältlich:

Oxyal® ist in Augentropfenflaschen zu 10 ml erhältlich.

Zusammensetzung:

0,15% Hyaluronsäure, 0,5% Polyethylenglykol 400, Kalzium Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Wasser und Oxyd®. Oxyd® wird als Konservierungsmittel verwendet, das auf der Augoberfläche zu Sauerstoff, Wasser und Salz-Ionen umwandelt.

Zweckbestimmung:

Oxyal® wird zur Beruhigung und Linderung der Symptome des trockenen Auges angewendet. Symptome hierfür können sein: Augenerregung, Rötung, brennende Augen, Trockenheit, Lichtempfindlichkeit, Gefühl von Fremdkörpern in den Augen und dem sogenannten Sandgefühl. Die Symptome können durch Brillenarbeit, längere Reisen, Aufenthalt in der Klimaanlage hervorgerufen werden.

Wie häufig ist Oxyal® anzuwenden?


Tropfen Sie je nach Bedarf 1 Tropfen in das Auge. Oxyal® ist täglich beliebig häufig nach Bedarf anwendbar. Oxyal® zur Befeuchtung von weichen und Kontaktlinsen sowie zur Nachbenetzung während des Tragens der Kontaktlinsen.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Oxyal

In seltenen Fällen kann dies ein Produkt überempfindlichkeit, wie lokale allergische Reaktion, verursachen. Falls dies der Fall ist, sollte das Produkt eher verwendet werden. Oxyal® enthält das Konservierungsmittel YS 1. Bitte verwenden Sie Oxyal® nicht mehr nach dem Mindestverwendbarkeitsdatum, wenn die Flasche beschriftet ist. Bei jeder Augenreparatur warten Sie ca. 15 Minuten, bevor ein weiteres Präparat eingebracht wird. Oxyal® ist für alle Arten von Kontaktlinsen geeignet und direkt auf die Kontaktlinsen getropft werden.

Oxal® Anwendung gestellt von **Gebrauchs.info**

Die Abbildungen zeigen Ihnen die einfache Anwendung von Oxal®

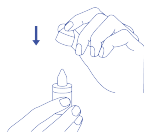

1. Entfernen Sie vor jeder 2. Anwendung die Schutzhautkappe. Legen Sie Ihre Hand flach auf Ihre Augenlider, ziehen Sie jedes Lid mit einem Finger in die Richtung der Fingerspitze. Entfernen Sie die Fingerspitze von dem unteren Augenlid mit einem Finger. Reinigen Sie die Fingerspitze nach unten und außen mit einem sauberen Tuch. Reinigen Sie die Fingerspitze nach unten und innen. Ziehen Sie die Kappe über Ihr Auge.

Drücken Sie anschließend vorsichtig einen Tropfen aus der Flasche.

Herseller: Dr. Mann Pharma, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Bunsbütteler Dam 165-173, 13581 Berlin
Vertrieb: Dr. Robert Winkler Pharma GmbH, Bunsbütteler Dam 165-173, 13581 Berlin
Tel.: (030) 33093-5070
Fax: (030) 33093-305
E-Mail: service@drwinzler.de
www.drwinzler.de



Das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.



Das Medizinprodukt kann nach dem Öffnen 2 Monate verwendet werden.



Mindestverwendbarkeitsdatum.



Gebrauchsanleitung beachten!



Chargennummer



Sterilisationsmethode, aseptisch

Oxal® und Oxyd® sind eingetragene Warenzeichen der Dr. Robert Winkler Pharma GmbH oder ihrer verbundenen Unternehmen.
© Dr. Robert Winkler Pharma GmbH

Weitere Informationen zu Oxal®

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird dem Lagerraum der Augoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen und bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu unterstützen. Eine gestörte Tränenproduktion kann zu Beschwerden werden, wie z. B. Trockene Augen, erhöhte Empfindlichkeit und gereizte und gerötete Augen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

Wie kann Oxal® Ihren Augen helfen?

Mit dem 2-Phasen-System aus Hyaluron und PUFs und Wasser, Magnesium, Kalium, Kalzium und Natrium ergänzt Oxal® den Tränenfilm und hilft, dessen Gleichgewicht wiederherzustellen. Ihre Augen sind für eine längere Zeitspanne leichter zu öffnen, wenn Sie sich in der Sonne befinden. Oxal® ist ein wirksames Mittel zur Behandlung von trockenen Augen.

Und das können Sie persönlich tun:

- Legen Sie bei Beschwerden immer öfter eine Pause ein.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Lüften Sie regelmäßig.
- Schützen Sie Ihre Augen vor Wind, wenn Sie im Freien aufhalten.
- Reinigen Sie Ihre Augen regelmäßig.