



Premium Kondome

Hergestellt aus dem natürlichen Rohstoff des Gummibaums, Naturkautschuklatex, ermöglichen Ritex Kondome ein intensives und besonders natürliches Gefühl. Sie sind hochelastisch und passen sich optimal allen Penisgrößen an – **wie eine zweite Haut.**



47
Schlanke
Passform
Sicheres
Gefühl



Stark
0,1 mm
Wanddicke



Sortiment
Mehr Abwechslung
Mehr Spaß



XXL
Extra groß
Mehr Komfort



Ideal
Extra feucht



RR.1
Gefühlsintensiv



Extra dünn
Natürliches
Empfinden



Lust
Genoppt &
Gerippt



Aquaresse
Mit wasserbasier-
tem Gleitmittel
Ritex Aqua Gel®



Mega Mix
Mehr Abwechslung
Mehr Spaß
Je 2x RR.1, Ideal,
Extra dünn,
Erdbeer, Fleur,
Lust

RITEX QUALITÄTSVERSPRECHEN

Dermatologisch getestet · sehr gut hautverträglich

Kondom-Gebrauchshinweise:



Siegelbriefchen **behutsam** an der **Zackenkante** aufreißen. Bitte beachten Sie, dass z. B. Fingernägel, Schmuck oder Piercings im Intimbereich das Kondom beschädigen können.



Bevor Penis und Körper des Partners sich berühren, das Kondom über den steifen Penis abrollen. **Vorhaut ganz zurückziehen**, Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, mit **Abrollrand nach außen** auf die Eichel setzen und das Kondom vollständig abrollen.



Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, das Kondom rutscht oder sehr spannt (Gefahr des Berstens), ziehen Sie den Penis heraus. **Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht.** Sollte das Kondom nach Verwendung ein Loch aufweisen oder gerissen sein, sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden einen Arzt aufsuchen.

Ritex Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler Anwendung ist das Risiko des Abrutschens oder der Beschädigung höher. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren.

Um **mangelnde Gleitfähigkeit**, z. B. bei zu geringer Scheidenfeuchtigkeit oder bei Analverkehr zu beheben, sollten zusätzlich kondomverträgliche **Ritex Gleitmittel wie z. B. GEL+, HYDRO Sensitiv Gel, BIO Gleitgel, LongTime PLUS oder Passion** in ausreichender Menge auf der **Außenseite des Kondoms** benutzt werden. Niemals zusätzliche Gleitmittel direkt auf dem Penis oder der Innenseite des Kondoms verwenden, da sich hierdurch das Risiko erhöht, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Nie öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) verwenden, sondern nur solche, die vom Hersteller für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind.

Bei Anwendung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. im Intimbereich fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können.

zur Verfügung gestellt von Gebrauchz.info

Kondome bei Raumtemperatur nur in original verschlossenen Siegelbriefchen aufbewahren.

Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

Wenn eine ungewollte Befruchtung oder Infektion zu befürchten ist, oder wenn bei der Kondombenutzung Unverträglichkeiten auftreten, fragen Sie Ihren Arzt oder informieren Sie sich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

Persönliche und anonyme Online- und Telefonberatung zum Thema Safer Sex, Verhütung etc. täglich ab 10 Uhr: 01805/555444 (14 ct / min aus d. dt. Festnetz).
Telefonberatung@bzga.de
oder www.aidsberatung.de

Ritex – für ein gutes Gefühl

Medizinprodukte-Hersteller werden jährlich von ihrer **benannten Stelle** überprüft. In diesen Überprüfungen muss der Hersteller darlegen, dass sein Qualitätssystemsmanagement geeignet ist, die Anforderungen an das zu zertifizierende Medizinprodukt zu erfüllen.

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus lässt Ritex die Qualität seiner Kondome durch die staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) Darmstadt gemäß Inspektionsprogramm IP-494 **fremdüberwachen**. Mit diesem Inspektions-

programm hat die MPA Darmstadt ein Programm zur Gütesicherung von Kondomen und Inspektion von Kondomherstellern geschaffen, welches noch über die Anforderungen der aktuellen EN ISO 4074 hinausgeht.

Hierdurch wird sichergestellt, dass nicht nur das Qualitätsmanagementsystem des Herstellers in Ordnung ist, sondern dass die Qualität der Produkte selbst nachgeprüft wird. Die MPA zieht beim Hersteller Stichproben und überprüft diese im Labor der Materialprüfungsanstalt. Nur wenn alles in Ordnung ist, dürfen die jeweiligen Produkte mit dem MPA-TESTED-Zeichen ausgezeichnet werden.








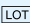




Neben der Überprüfung der werkeigenen Produktionskontrolle ist die herausragende Besonderheit, dass die Qualität der Produkte selbst von einer staatlichen Materialprüfungsanstalt nachgeprüft wird.

Mehr Informationen finden Sie unter www.ritex.de.



Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

-  Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.
-  Jedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.
-  Nicht benutzen, wenn das Siegelbriefchen beschädigt ist. Kondom entsorgen und ein neues verwenden.
-  Kondome vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt lagern.
-  Kondome trocken lagern.
-  Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.
-  Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex, der bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Latex-Allergiker dürfen diese Kondome deshalb nicht benutzen.
-  Nummer der Kondomcharge
-  Ritex Artikelnummer
-  Hersteller

 Ritex GmbH
Gustav-Winkler-Straße 50
D-33699 Bielefeld · Germany
ritex@ritex.de
www.ritex.de