

ANABOX® TABLETTEILETER

 Gebrauchsanweisung

Medizinprodukt der Klasse I

Version: 01/2020



①

Bringen Sie den **ANABOX®** Tablettenteiler zur Befüllung und Nutzung in eine waagerechte Position.



②

Zum Öffnen des **ANABOX®** Tablettenteilers drücken Sie die beiden äußeren Rastnasen leicht ein und ziehen Sie die beiden Griffteile nach außen.



③

Legen Sie nun die zu teilende Tablette in das dafür vorgesehene Fach. Wenn möglich, berücksichtigen Sie hierbei die Ausrichtung der Sollbruchstelle der Tablette.



④

Schieben Sie die beiden Außenteile zusammen, dadurch wird die Tablette zentriert und bei leicht erhöhten Druck geteilt. Schieben Sie den **ANABOX®** Tablettenteiler soweit zusammen bis beide Rastnasen wieder einrasten.



⑤

Bringen Sie den **ANABOX®** Tablettenteiler zum Öffnen in eine waagerechte Position und drücken Sie die Rastnasen leicht ein. Die geteilte Tablette kann nun entnommen werden.



⑥

Um den **ANABOX®** Tablettenteiler von Tablettenstaub zu befreien, kann die Kappe durch eine leichte Drehbewegung gelöst und abgenommen werden.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unsere nützlichen Tipps und Hinweise:

REINIGUNG

- ✓ Bitte reinigen Sie den **ANABOX®** Tablettenteiler regelmäßig, je nach Bedarf.
- ✓ Vor Erstgebrauch bitte den **ANABOX®** Tablettenteiler im geöffneten Zustand auswaschen.
Empfehlung: Mit lauwarmem Wasser und einem milden, für die Reinigung von Geschirr in privaten Haushalten zugelassenem Reinigungs- bzw. Spülmittel säubern.
- ✓ Durch eine leichte Drehbewegung die Kappe an einer Seite des **ANABOX®** Tablettenteilers lösen, so kann auch die innere Kammer gereinigt und getrocknet werden (Bild 6).

GEBRAUCHSHINWEISE

- ✓ Bevor Sie den **ANABOX®** Tablettenteiler einsetzen, überprüfen Sie bitte mittels des Beipackzettels des Medikaments, ob die Tablette geteilt werden darf. Im Zweifel befragen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.
- ✓ Beachten Sie bitte auch eventuelle besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten, wie z. B. Lichtempfindlichkeit und Temperatur laut Beipackzettel des jeweiligen Medikaments. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des Medikaments.
- ✓ Für die unkorrekte Benutzung des **ANABOX®** Tablettenteilers oder die unkorrekte Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung!
- ✓ Bewahren Sie den **ANABOX®** Tablettenteiler sicher vor Kindern auf!
- ✓ Die Benutzung des **ANABOX®** Tablettenteilers durch Personen mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.
- ✓ Ausgehend von dem auf der Rückseite aufgedruckten Produktionsdatum (Produktionsuhren – Jahr / Monat), ist das Produkt bei sachgerechtem Gebrauch, ordnungsgemäßer Lagerung und Reinigung 5 Jahre zu verwenden.



anmed GmbH

Gerichtsstr. 140, 09474 Crottendorf

Tel.: +49 (0) 37344 763800

Mail: info@anmed.de

Web: www.anabox.de



DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch: WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, D-56204 Hilscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

Kennen Sie schon unsere **ANABOX®** Medikamentendosierer?
Verfügbar in vielen verschiedenen Farben und Größen – erhältlich in jeder Apotheke.
Nähere Informationen finden Sie unter www.anabox.de