

# Askina® DresSil | Askina® DresSil Border | Askina® DresSil Sacrum

## Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband



Sehr gutes Exsudatmanagement

Einfaches Handling

Hoher Tragekomfort für den Patienten

Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben

Unter Kompression verwendbar

Hypoallergen


### Silikon-Hafttechnologie

Die Wundauflagen sind mit einer weichen Silikon-Haftfläche beschichtet und haften daher sanft und sicher. Das verwendete Silikon passt sich optimal der unebenen Hautoberfläche an und bildet so im Vergleich zu traditionellen Haftbasen eine größere Kontaktfläche zur Haut.

Askina® DresSil ist atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut. Die Silikon-Haftfläche minimiert das Trauma und den Schmerz beim Verbandwechsel.

Der atmungsaktive, hochabsorbierende Polyurethanschaum gewährleistet ein sehr gutes Exsudatmanagement, über den transparenten, für Wasser und Bakterien undurchlässigen Polyurethanfilm kann das Exsudat verdunsten.

### Der Aufbau von Askina® DresSil

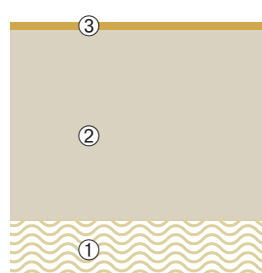

#### 1. Schicht – Silikonhaftbasis

Verklebt nicht mit der Wunde und erleichtert den Durchfluss des Exsudates in den Schaum dank silikonfreier Flächen

#### 2. Schicht – Polyurethanschaum

Absorbiert und hält Wundexsudat zurück, verhindert das Einwachsen von Granulationsgewebe in die Wundauflage

3. Schicht – Semipermeable Polyurethanfolie  
Diffusionsoffen und wasserundurchlässig

## RKI RICHTLINIE KRANKENHAUSHYGIENE:

Sekundär heilende und exsudierende Wunden benötigen eine sterile Wundauflage. Auch jede Spülflüssigkeit muss steril sein.



## Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Traumatische Wunden
- › Chirurgische Wunden
- › Palliative Wunden



Askina® DresSil



Askina® DresSil Border



Askina® DresSil Sacrum



Askina® DresSil			
Abmessung	VE	PZN	REF
5 cm x 7 cm	3 Stück	6489137	5295703
5 cm x 7 cm	10 Stück	6489166	5295710
10 cm x 10 cm	3 Stück	6489172	5291003
10 cm x 10 cm	10 Stück	6489189	5291010
15 cm x 15 cm	3 Stück	6489203	5291503
15 cm x 15 cm	10 Stück	6489226	5291510
10 cm x 20 cm	3 Stück	6489338	5291203
10 cm x 20 cm	10 Stück	6489404	5291210
20 cm x 20 cm	5 Stück	6489410	5292005

- ① Wunde in der Epithelisierungsphase  
Ziel: Atraumatische und schmerzfreie Verbandwechsel
- ② Der optimale Verband zum Schutz des neugebildeten Epithelgewebes ist Askina® DresSil.
- ③ Bereits nach 2 Tagen ist die Wunde unter dem Verband fast vollständig epithelisiert.
- ④ Abgeheilte Wunde mit sehr gutem kosmetischen Ergebnis.

Askina® DresSil Border	Abmessung	VE	PZN	REF
Askina® DresSil Border				
Größe ohne FR	4,5 cm x 4,5 cm	3 Stück	7626211	5397503
Größe mit FR	7,5 cm x 7,5 cm			
Größe ohne FR	4,5 cm x 4,5 cm	10 Stück	7626300	5397510
Größe mit FR	7,5 cm x 7,5 cm			
Größe ohne FR	7 cm x 7 cm	3 Stück	7626323	5391003
Größe mit FR	10 cm x 10 cm			
Größe ohne FR	7 cm x 7 cm	10 Stück	7626352	5391010
Größe mit FR	10 cm x 10 cm			
Größe ohne FR	12 cm x 12 cm	3 Stück	7626375	5391503
Größe mit FR	15 cm x 15 cm			
Größe ohne FR	12 cm x 12 cm	10 Stück	7626381	5391510
Größe mit FR	15 cm x 15 cm			
Größe ohne FR	12 cm x 17 cm	3 Stück	7626435	5395203
Größe mit FR	15 cm x 20 cm			
Größe ohne FR	12 cm x 17 cm	10 Stück	7626441	5395210
Größe mit FR	15 cm x 20 cm			
Größe ohne FR	17 cm x 17 cm	5 Stück	7626458	5392005
Größe mit FR	20 cm x 20 cm			
Askina® DresSil Sacrum *				
Größe ohne FR	13 cm x 14,5 cm	5 Stück	7765243	5491605
Größe mit FR	16 cm x 17,5 cm			

FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)

\* Verfügbar ab September 2011