


MADE IN
GERMANY
FOR SEX

 MAPA GmbH
Industriestraße 21–25
27404 Zeven,
Germany

BILLY BOY®

Artikel-Nr. 11.520.130

Rev. 16 (2020-10)



Medizinprodukt (EU) No. 2017/745

WICHTIGE HINWEISE

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf sollte das Kondom nicht mehr verwendet werden! Kondome kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Dennoch können Unverträglichkeiten in Form allergischer Reaktionen (z. B. Latex-Allergie) bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auftreten. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Bei richtiger Anwendung schützen BILLY BOY-Kondome vor Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

GEBRAUCHSHINWEISE

BILLY BOY – FÜR JEDEN DAS PASSENDE PRODUKT:

Bunte Vielfalt

Mix aus farbig, fruchtig & perlenoppt

Aromatisiert

Fruchtig duftend für mehr Abwechslung

Gefühlsintensiv

Mit mehr Freiraum für ein natürlicheres Erlebnis

Länger lieben

Konturiert für festeren Sitz und längeren Spaß

Sinnesrausch

Stimulierend mit Rippen, Perlnoppen & sinnlichem Duft

Einfach drauf

Extra leichtes Abrollen, einfach Spaß

Fresh & feel

Aufregend cooler Duft, extra leichtes Abrollen

Extra feucht

Mehr Gleitfilm für natürlicheres Empfinden

Extra groß

Mehr Länge & Freiraum für einen komfortablen Sitz

Sicheres Gefühl

Wandstärke ca. 0,1 mm für entspannteres Vergnügen

Extra dünn

Hauchzart für noch intensiveres Empfinden

White

Angenehm zarter Duft für unbeschwertes Genuss

White Comfort

Unbeschwert mit zartem Duft und mehr Freiraum

BILLY BOY®
liebt euch

1. AUFREISSEN



Die Siegelfolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle („open here“) öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen

Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden!

2. VORSPIEL



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut komplett zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her

vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft ➔

unterstützend wirken. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

3. NACHSPIEL



Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dafür das Kondom am Penisansatz fest, so verhindern Sie ein Abrutschen des Kondoms.

4. ENTSORGUNG

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

VORSICHT!

Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z. B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern (z. B. BILLY BOY white Gleit- und Massagegel oder BILLY BOY Gleitgel). Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie ➔

Medikamente (Salben, Gele etc.) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom verwenden.

PERSÖNLICHE UND ANONYME TELEFONBERATUNG ZUM THEMA SAFER SEX UND VERHÜTUNG ETC.:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

- Täglich ab 10.00 Uhr unter 01805/555444 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, maximal 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz)
- telefonberatung@bzga.de oder www.aidsberatung.de