

# **D** BLEPHACLEAN®



Sehr gut verträgliche, konservierungsmittelfreie Reinigungs lotion zur täglichen Pflege der Augenlider und der empfindlichen Haut.

## **ZUSAMMENSETZUNG:**

Polysorbat 20, Poloxamer 184, PEG 8, PEG 6 Caprylic, Capryloyl Glycine, Dipotassiumphosphat, Potassiumphosphat, Natriumhydroxid, Propylenglycol, Hyaluronsäure, Centella asiatica, Iris florentina, Zinksulfat, Vitamin A-Palmitat, Alkohol, Wasser

## **DARREICHUNGSFORM UND INHALT:**

20 imprägnierte, sterile Kompressen zur einmaligen Anwendung.  
Zur kutanen Anwendung.

## **EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSGEBIETE:**

BLEPHACLEAN® empfiehlt sich zur täglichen Reinigung der Augenlider und der empfindlichen Haut. BLEPHACLEAN® ist frei von Reinigungs- und Konservierungsmitteln und entfernt Unreinheiten, Krusten und Make-up-Rückstände auf den Augenlidern und der Haut, ohne die Augen zu reizen und die oberen Schichten der Epidermis anzugreifen.

BLEPHACLEAN® reinigt nicht nur wirksam, sondern ist auch speziell entwickelt worden zur Befeuchtung der oberen Hautschichten und Regeneration der empfindlichen Haut, dank der darin enthaltenen Hyaluronsäure (natürlicher Hautbefeuchter), Capryloyl-Glycin (Talgeregulator), Iris florentina (Talgeregulator) und Centella asiatica (Regenerator). Nach der Anwendung von BLEPHACLEAN® ist ein Nachspülen nicht erforderlich, da BLEPHACLEAN® fett- und duftstofffrei ist.

BLEPHACLEAN® ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

## **ANWENDUNG:**

### **1. Hygiene der Augenlider und Wimpern:**

Öffnen Sie den Verpackungsbeutel und entfalten Sie die Komresse. Drücken Sie die Komresse bei geschlossenem Auge sanft auf das Augenlid und die Wimpern. Durch sanft kreisende Massagebewegungen auf dem Augenlid werden Verkrustungen, Sekret und Make-up schonend entfernt.

### **2. Hygiene des inneren Lidrandes:**

Ziehen Sie das untere Augenlid vor einem Spiegel vorsichtig nach unten. Reinigen Sie den inneren Lidrand sehr vorsichtig, indem Sie ihn mit einer zusammengerollten Komresse abwischen.

### **3. Wiederholen Sie die Reinigung am anderen Auge, wobei Sie eine neue Komresse benutzen.**

In der Regel genügen zwei Anwendungen täglich, morgens und abends.

## **AUFBEWAHRUNG:**

Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

## **WARNHINWEIS:**

Zur kutanen Anwendung. Nicht direkt in die Augen geben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## **HERSTELLER**

Laboratoires Théa S.A. ~ 12, rue Louis Blériot ~ F-63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

## **VERTRIEB in DEUTSCHLAND**

Théa Pharma GmbH ~ Revierstrasse 10 ~ D-44379 Dortmund ~ Fon/Fax 0231-618080-0 / -29