

Die Einnahme von Medikamenten und bestimmte Erkrankungen können das Ergebnis des Schwangerschaftstests beeinflussen:

- Lesen Sie vor der Durchführung des Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen.
- Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können zu irreführenden Ergebnissen führen. (Diese fruchtbarkeitsfördernden Arzneimittel werden üblicherweise injiziert. Wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.)
- Andere fruchtbarkeitsfördernde Mittel, Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z. B. Antibabypille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
- Wenn Sie erst seit Kurzem keine hormonellen Verhütungsmittel mehr einnehmen oder wenn Sie fruchtbarkeitsfördernde Mittel einnehmen, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein, sodass Sie möglicherweise zu früh testen.
- Wenn Sie bis vor Kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.
- Eileiterschwangerschaft, Zysten an den Eierstöcken, die Wechseljahre und einige sehr seltene Erkrankungen können zu irreführenden Ergebnissen führen.
- Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, kann sich evtl. später herausstellen, dass Sie nicht schwanger sind, da sich im Frühstadium ein natürlicher Abgang ereignen kann.

Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

Der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor führt den Schwangerschaftstest durch, indem er das Schwangerschaftshormon (hCG) in Ihrem Urin nachweist. In Labortests hat sich der Test bei der Bestimmung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag der Periode zu mehr als 99 % zuverlässig erwiesen.

Clearblue empfiehlt das Testen ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode. Da jedoch der Spiegel des Schwangerschaftshormons in der Frühschwangerschaft rasch ansteigt, kann bereits 3 Tage vor Fälligkeit der Periode ein Schwangerschaftstest mit dem Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor durchgeführt werden. Bei klinischen Untersuchungen mit Proben aus der Frühschwangerschaft ermittelte der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor die folgenden Ergebnisse:

Anzahl der Tage vor Fälligkeit der Periode	% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben
-1	96 %
-2	91 %
-3	74 %

Clearblue

Fertilitätsmonitor
Advanced Schwangerschaftstests



Diese Schwangerschaftstests dürfen nur zusammen mit dem Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor verwendet werden. Sie sind nicht zur Verwendung mit einem anderen Clearblue Fertilitätsmonitor geeignet. Lesen Sie vor Anwendung dieser Tests die dem Monitor beigefügte Gebrauchsanweisung. Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal verwenden, stellen Sie einen neuen Zyklus ein, bevor Sie einen Schwangerschaftstest durchführen.

Wenn Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Fertilitätsmonitors verloren haben, können Sie beim Beratungsservice von Clearblue eine neue Kopie anfordern oder sich die Anleitung von der Website www.clearblue.com herunterladen.

Wie zuverlässig ist der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor?

In Labortests hat sich der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor bei der Bestimmung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag der Periode zu mehr als 99 % zuverlässig erwiesen.

Ergebnis des Schwangerschaftstests



Ihr Ergebnis ist „Schwanger“. Suchen Sie Ihren Arzt auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen.



Ihr Ergebnis ist „Nicht Schwanger“. Sie sind entweder nicht schwanger, oder der Spiegel des Schwangerschaftshormons ist nicht hoch genug für eine Erkennung durch den Test, falls Sie ihn vor Fälligkeit Ihrer Periode durchgeführt haben. Wiederholen Sie den Test bei Fälligkeit Ihrer Periode.

Wenn Sie den Test am Fälligkeitstag Ihrer Periode durchführen und das Ergebnis erneut „Nicht Schwanger“ lautet, sollten Sie den Test nach 3 Tagen noch einmal wiederholen. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Testfehler

Tritt während des Testens ein Fehler auf, zeigt das Display eine Fehlermeldung an. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Monitors.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
Genf, Schweiz.
Clearblue ist eine Marke von SPD.
©2019 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

Für den Selbsttest zu Hause.
Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.
Nicht zur inneren Anwendung.
Teststäbchen nicht wiederverwenden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei 2-30 °C aufbewahren.
Das Produkt 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen, wenn es tiefgekühlt ist.
Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung des Teststäbchens beschädigt ist. Teststäbchen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden.

www.clearblue.com
Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 - 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.
DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359
Kostenlos aus dem Festnetz, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können Kosten entstehen. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie die Chargennummer [LOT] bereit.



	Hersteller		Nicht wiederverwenden
	Batch-Code		Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> - Diagnostik
	Verfallsdatum		Temperaturbegrenzung 2 °C - 30 °C

Durchführung des Tests

Der Monitor fordert lediglich zu Fruchtbarkeitstests auf. Er schätzt ein, wann Ihre Periode fällig ist. Ein Schwangerschaftstest kann jedoch an jedem beliebigen Tag durchgeführt werden, sofern zuvor ein Zyklus eingestellt wurde. Sie können einmal während Ihres Testzeitraums testen. Wenn jedoch ein Fehler angezeigt wird, können Sie den Test mit einem neuen Teststäbchen erneut durchführen. Falls Sie Ihren Urin für einen späteren Test aufbewahren möchten, wenn Sie zum Beispiel zur Toilette gehen müssen, bevor Ihr Testzeitraum beginnt, dann verwenden Sie hierfür einen sauberen und trockenen Behälter und bewahren Sie diesen bis zur Durchführung des Tests bei Raumtemperatur auf. Denken Sie daran, den Test während des Testzeitraums durchzuführen.


- 1 Wählen Sie den richtigen Test aus, wenn Sie mit dem Test beginnen möchten. Schwangerschaftstests haben eine weiße Folie.



- 2 Öffnen Sie die Folie, nehmen Sie den Test heraus und verwenden Sie den Test umgehend.



Halten Sie das Teststäbchen nicht mit der saugfähigen Testspitze nach oben, da das Ergebnis beeinflusst werden könnte.

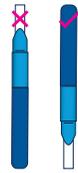

- 3 Wählen Sie Ihre Testmethode aus:

In Ihrem Urinstrahl

Halten Sie das Teststäbchen mit der saugfähigen Testspitze nach unten weisend für 3 Sekunden in Ihren Urinstrahl.



ODER

Eintauchen


Fangen Sie eine Urinprobe in einem sauberen, trockenen Behälter auf und tauchen Sie, wie abgebildet, nur die saugfähige Testspitze für 15 Sekunden in die Urinprobe, nicht länger.



- 4 Nehmen Sie die Kappe ab.



- 5 Stecken Sie die Kappe auf die saugfähige Testspitze. Wischen Sie jeglichen überschüssigen Urin ab.

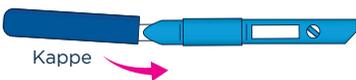


- 6 Legen Sie den Test umgehend in den Monitor ein. Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn erneut ein und **warten Sie, bis auf dem Display Clearblue nicht mehr angezeigt wird. Führen Sie erst dann das Teststäbchen ein.**

- 7 Suchen Sie nach dem Testschlitz.




- 8 Halten Sie den Monitor in einer flachen Position oder legen Sie ihn auf eine flache Unterlage.


- 9 Führen Sie das Teststäbchen mit der abgeschragten Kante nach unten und der farbigen Seite auf der rechten Seite des Testschlitzes ein.

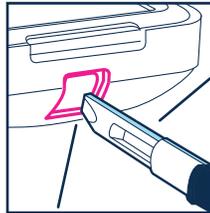

Stellen Sie sicher, dass sich die farbige Seite des Teststäbchens auf der rechten Seite des Testschlitzes befindet.

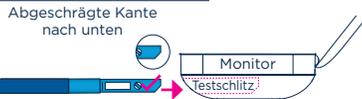

- 10 Schieben Sie das Teststäbchen hinein, bis Sie ein Klicken hören.

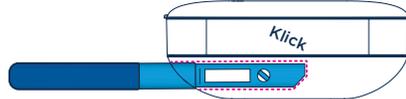

FALSCH

Führen Sie nicht die saugfähige Testspitze in den Monitor ein.



Führen Sie das Teststäbchen nicht mit nach oben weisender abgeschragter Kante in den Monitor ein.



Führen Sie nicht die Kappe in den Monitor ein.



- 11 Der Monitor bestätigt, dass der Test richtig durchgeführt wurde und stellt fest, ob es sich um einen Fruchtbarkeits- oder Schwangerschaftstest handelt. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird ein Countdown-Display angezeigt.



Entfernen Sie während des Countdowns keinesfalls das Teststäbchen. Wenn Sie das Teststäbchen zu früh entfernen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Das Display schaltet sich zwar nach 1 Minute ab, aber der Monitor fährt mit der Analyse des Tests fort. Das Testlicht blinkt.

- 12 Warten Sie 5 Minuten, bis das Ergebnis bereitsteht.
- 13 Wenn Sie den Monitor wieder einschalten, können Sie auf dem Display sehen, wie lange Sie warten müssen. Bei Testende ertönt ein Signal, und das Licht hört auf zu blinken.
- 14 Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn wieder ein und entnehmen das Teststäbchen.
- 15 Lesen Sie das Ergebnis ab. Das Ergebnis kann nur am Monitor abgelesen werden. Eventuell auf dem Teststäbchen sichtbare Linien sind nicht aussagekräftig.
- 16 Entsorgen Sie das Teststäbchen im normalen Hausmüll. Verwenden Sie den Test nicht wieder.