

Cuticell® Epigraft

Der Spezialist für Spalthautentnahmestellen.

Produkt

Die innovative Wundauflage Cuticell® Epigraft überzeugt durch beeindruckende Ergebnisse bei der Behandlung von Spalthautentnahmestellen. Das Produkt unterstützt die sofortige Schmerzreduktion und wirkt wie eine Keimbarriere.

Cuticell® Epigraft ist transparent, dadurch kann der Wundheilungsverlauf während der Behandlung beobachtet werden. Während der Anwendung von Cuticell® Epigraft sind in der Regel keine Verbandwechsel notwendig. Das Produkt verbindet sich mit der feuchten Wunde und schmiegt sich an.

Cuticell® Epigraft besteht aus einem Zellulosefilm.



Anwendung

- Spalthautentnahmestellen
- Schnittwunden und Hautabschürfungen
- kleinere chirurgische Wunden
- Verbrennungen (2a)

Anwendungsdauer: indikationsabhängig

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7265001	10 cm x 7,50 cm	10 Stück	1/20	05524831
7265003	15 cm x 10,00 cm	10 Stück	1/10	05524848
7265004	20 cm x 15,00 cm	10 Stück	1/10	05524860

Histofreezer®

Das bewährte kryochirurgische System zur Behandlung von Warzen und gutartigen Hautläsionen.

Produkt

Histofreezer® ist das bewährte kryochirurgische System für die unkomplizierte, unblutige und schmerzarme Entfernung von Warzen und anderen gutartigen Hautläsionen bei einer minimalen Gefahr von Narbenbildung. Dank seiner kompakten Größe und einfachen Handhabung eignet sich das Therapeutikum besonders für Dermatologen und Chirurgen, aber auch für Allgemeinmediziner und Kinderärzte. Die lange Haltbarkeit von drei Jahren gewährleistet die Wirtschaftlichkeit auch bei seltener Anwendung. In der kompakten Aerosolflasche befindet sich ein flüssiges Gasgemisch aus Dimethylether, Propan und Isobutan. Mit einfachem Fingerdruck werden spezielle Applikatoren mit dem Gasgemisch gefüllt und kühlen durch Änderung des Aggregatzustandes innerhalb weniger Sekunden auf -55°C ab, die optimale Temperatur zur Warzenvereisung. Es ist kein steriles Umfeld nötig, keine Anästhesie und für jede Indikation ist die richtige Applikatorgröße erhältlich: klein (2 mm) und mittel (5 mm).

Weitere Vorteile für den Arzt sind die hohe Wirtschaftlichkeit im Vergleich zur Vorhaltung von flüssigem Stickstoff und die hohe Patientenakzeptanz.

Histofreezer® besteht aus einem Dimethylether-Propan-Isobutan-Gasgemisch.



Anwendung

- Verrucae vulgares
- Molluscum contagiosum
- Akrochordon
- Verrucae seborrhoicae
- Verrucae plantares
- Verrucae planae juveniles
- Aktinische Keratose
- Lentigo



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7217904	S	1 Dose (170 ml) + 60 Applikatoren (2 mm)	1/6	04074337
7217905	M	1 Dose (170 ml) + 50 Applikatoren (5 mm)	1/6	04074805