

cyclotest® Ovulationstest

Ovulationstest für die natürliche Familienplanung zum Nachweis des Eisprunghormons hLH im Urin

Mit dem cyclotest® Ovulationstest können Sie den Zeitpunkt für erfolgsversprechenden Geschlechtsverkehr herausfinden. Sie können den Ovulationstest auch in Kombination mit der symptothermalen Methode oder einem cyclotest® Zykluscomputer anwenden (weitere Infos unter www.cyclotest.de).

PZN 01399381



- In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
- Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Gebrauchsanleitung beachten

Anwendung:

1. Bestimmen Sie anhand Ihrer Zykluslänge, wann Sie den ersten Ovulationstest verwenden sollten.

Bei diesem Beispiel, das einen Zyklus von 28 Tagen darstellt, ist die Verwendung des Ovulationstests ab dem 11. Tag sinnvoll.



2. Die Anwendung ist einfach und das Ergebnis zuverlässig:



3. Fällt das Ergebnis des Ovulationstest positiv aus, sollten Sie bei Kinderwunsch Geschlechtsverkehr haben.

Beinhaltet:



9 x Ovulationstest