



ANWENDUNGSHINWEISE ZU DUREX GLEITGELEN


DUREX STRAWBERRY
DUREX PLAY FEEL
DUREX NATURALS EXTRA SENSITIV
DUREX NATURALS EXTRA FEUCHTIGKEITSSPENDEND

MEHR SEXPERIMENTE. MEHR VERGNÜGEN.

Geeignet für vaginalen und analen Sex. Kann vaginale Trockenheit lindern. Geeignet für Kondome aus Naturkautschuklatex und Polyisopren.

ANWENDUNG

Zum Auftragen den Deckel hochklappen und vorsichtig drücken. Einfach eine kleine Menge im Intimbereich oder (bei Verwendung mit Kondom) auf das angelegte Kondom auftragen.

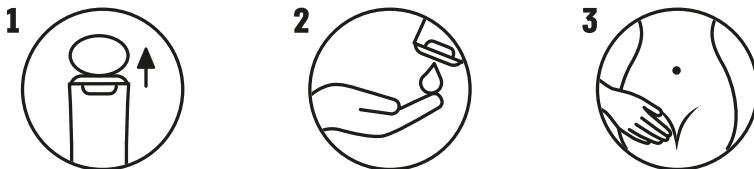

WARNHINWEISE

Kein Verhütungsmittel, enthält keine Spermizide. Kann Spermien verlangsamen. Kontakt mit Augen, gereizter Haut, Wunden vermeiden. Bei Reizungen Produkt nicht mehr verwenden. Arzt fragen, wenn die Reizung länger anhält, bei anhaltender vaginaler Trockenheit, Schwangerschaft, in der Stillzeit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Lebensmittel. Nicht mit Polyurethan-Kondomen verwenden.

LAGERHINWEISE

Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen verbrauchen.

Medizinprodukt in der EU, von SGS nach MDD 93/42/EEC zertifiziert.

Im Müll entsorgen.



Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg

Für mehr Infos besuche www.durex.de



@durex.de

INGREDIENTS

DUREX STRAWBERRY

Aqua, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Carbomer, Aroma, Benzoic Acid, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide

DUREX PLAY FEEL

Aqua, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Carbomer, Benzoic Acid, Sodium Hydroxide






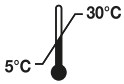




DUREX NATURALS EXTRA SENSITIV

Aqua, Propanediol, Xanthan Gum, Benzoic acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Lactate, Lactic acid

DUREX NATURALS EXTRA FEUCHTIGKEITSSPENDEND

Aqua, Glycerin, Propanediol, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Sodium Hyaluronate, Potassium Lactate, Lactic Acid

ERKLÄRUNG DER HINWEISSYMBOLS AUF DER VERPACKUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden |  | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
|  | Medizinprodukt |  | Trocken lagern |
|  | Bitte Anwendungshinweise beachten |  | Lagerung des Produkts zwischen 5 °C und 30 °C |
|  | Achtung |  | Hersteller: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK |
|  | Verfallsdatum. Produkt nicht verwenden, wenn dieses Datum überschritten wurde |  | Chargennummer |

Stand: April 2023