



ANWENDUNGSHINWEISE ZU DUREX GLEITGELEN


DUREX WÄRMEND
DUREX PRICKELND
DUREX 2 IN 1 MASSAGE- UND GLEITGEL ALOE VERA
DUREX 2 IN 1 MASSAGE- UND GLEITGEL GUARANA

MEHR SEXPERIMENTE. MEHR VERGNÜGEN.

Geeignet für vaginalen und analen Sex. Kann vaginale Trockenheit lindern. Geeignet für Kondome aus Naturkautschuklatex und Polyisopren.

ANWENDUNG

Zum Auftragen den Deckel hochklappen und vorsichtig drücken. Einfach eine kleine Menge im Intimbereich oder (bei Verwendung mit Kondom) auf das angelegte Kondom auftragen.

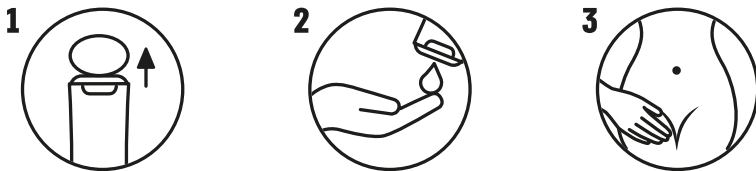

WARNHINWEISE

Kein Verhütungsmittel, enthält keine Spermizide. Kann Spermien verlangsamen. Kontakt mit Augen, gereizter Haut, Wunden vermeiden. Bei Reizungen Produkt nicht mehr verwenden. Arzt fragen, wenn die Reizung länger anhält, bei anhaltender vaginaler Trockenheit, Schwangerschaft, in der Stillzeit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Lebensmittel. Nicht mit Polyurethan-Kondomen verwenden.

LAGERHINWEISE

Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen verbrauchen.

Medizinprodukt in der EU, von SGS nach MDD 93/42/EEC zertifiziert.

Im Müll entsorgen.



Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg

Für mehr Infos besuche www.durex.de



@durex.de

INGREDIENTS

DUREX WÄRMEND

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Benzoic Acid, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide

DUREX PRICKELND

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, Aroma, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Citric Acid






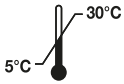




DUREX 2 IN 1 MASSAGE- UND GLEITGEL ALOE VERA

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Benzoic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide

DUREX 2 IN 1 MASSAGE- UND GLEITGEL GUARANA

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Benzoic Acid, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide, Paullinia Cupana Seed Extract, Cinnamaldehyde, Eugenol

ERKLÄRUNG DER HINWEISSYMBOLLE AUF DER VERPACKUNG

	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Medizinprodukt		Trocken lagern
	Bitte Anwendungshinweise beachten		Lagerung des Produkts zwischen 5 °C und 30 °C
	Achtung		Hersteller: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK
	Verfallsdatum. Produkt nicht verwenden, wenn dieses Datum überschritten wurde		Chargennummer