



---

# Sprunggelenkstütze Neopren Universal

ANWENDUNGSHINWEISE

Materialzusammensetzung: 62% Neopren, 30% Polyester, 8% Polyamid.

---

## ANWENDUNG

Die stark elastische Fußgelenkstütze gibt dem Gelenk viel Halt und Sicherheit. Sie ist bestens geeignet für den Schutz der Sehnen. Hilfreich auch bei Belastung oder nach Stauchungen. Die Beweglichkeit bleibt voll erhalten.

Durch das hochwertige Material wird die Körperwärme gespeichert. Neopren hat einen festen Sitz, sodass die Fußgelenkstütze nicht verrutscht. Die Stütze ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv.

Einheitsgröße – Durch Haftverschluss passend für beinahe jede Fußform.

1. Platzieren Sie die Bandage so unter dem Fuß, dass er auf dem leicht schmalen Teil der Stütze steht (Klettfläche schaut Richtung Boden). Das kürzere Ende muss zur Körpermitte zeigen.
2. Nehmen Sie das kürzere Ende der Stütze und führen es hoch in Richtung Knöchel.
3. Das längere Ende sollte nun straffgezogen werden.
4. Fixieren Sie es (Klettfläche möglichst mittig) auf dem kürzeren Ende und führen es hiernach weiter um den Knöchel herum.
5. Die Stütze mittels des kleinen Endstücks ein auf der Klettfläche fixieren.

