

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, HYLO® FRESH richtig anzuwenden.

HYLO® FRESH

Natriumhyaluronat 0,3 mg/ml und Euphrasia-Urlinle

Zur Linderung gereizter Augen

Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel

Was ist HYLO® FRESH?

HYLO® FRESH ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Lösung mit 0,3 mg/ml Natriumhyaluronat, Euphrasia-Urlinle, einem Boratpuffer und Wasser.

Wozu braucht man HYLO® FRESH?

Zur Linderung gereizter Augen.

Wann sollte man HYLO® FRESH anwenden?

HYLO® FRESH wird zur Linderung gereizter Augen benutzt. Gereizte und trockene Augen können durch umgebungsbedingte Belastungen wie intensive Bildschirmarbeit, trockenes Raumklima, Zugluft, vermehrte Sonneneinstrahlung, Belastung der Luft mit Staub oder Pollen oder Kontaktlinsenentwurf entstehen. Schon seit Jahrhunderten werden Zubereitungen aus Augentrost (*Euphrasia officinalis*) traditionell bei Bindehautreizungen mit gereizten und brennenden Augen, vermehrter Tränenabsonderung, Schwellungen und Rötungen der Augenlider oder der Lidränder angewandt. HYLO® FRESH enthält außerdem Natriumhyaluronat. Natriumhyaluronat erhöht die Viskosität der befeuchtenden Lösung und macht sie damit dickflüssiger als Wasser. Dadurch bleibt sie länger auf der Augenoberfläche haften. Durch die Anwendung der Augentropfen werden gereizte Augen und Augenlider beruhigt und erhalten eine tränentropfenartige Befeuchtung. Sie behandeln alle Symptome, die durch eine Austrocknung der Augenoberfläche entstehen, z. B. weil nicht ausreichend natürliche Tränen vom Körper produziert werden. HYLO® FRESH dient der besseren Befeuchtung der Augen auch beim Tragen von Kontaktlinsen.

Aufgrund der Konservierungsmittelfreiheit wird HYLO® FRESH im Allgemeinen hervorragend vertragen. HYLO® FRESH ist darüber hinaus phosphatfrei, so dass mögliche Komplikationen durch die Bildung von Ablagerungen in der Hornhaut vermieden werden.

Wie wendet man HYLO® FRESH an?

Verwenden Sie HYLO® FRESH nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war (☺).



Bild 1:

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen. Halten Sie dazu die Kappe knapp über der Flasche fest und ziehen Sie mit Ihrer anderen Hand die Flasche mit einer Drehbewegung von der Kappe weg.

Bitte vor der ersten Anwendung von HYLO® FRESH die Flasche mit der Tropferspitze senkrecht nach unten halten und so oft auf den Flaschenboden drücken, bis der erste Tropfen an der Tropferspitze austritt. Danach ist die Flasche für die folgenden Anwendungen gebrauchsfähig.



Bild 2:

Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze nach unten, indem Sie den Daumen auf die Flaschensohle und die anderen Finger auf den Flaschenboden legen.



Bild 3:

Stützen Sie die Hand mit der COMOD®-Flasche wie dargestellt auf der freien Hand ab.



Bild 4:

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie mit der freien Hand das Unterlid leicht vom Auge ab und drücken Sie schnell und kräftig in der Mitte auf den Flaschenboden. Dadurch wird der Mechanismus zur Entnahme eines Tropfens betätigt. Aufgrund der besonderen Ventilschließung des COMOD®-Systems sind die Größe und Geschwindigkeit des Tropfens auch bei sehr kräftigem Druck auf den Flaschenboden immer gleich. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.



Bild 5:

Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort sorgfältig mit der Kappe verschließen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropferspitze trocken ist. Vermeiden Sie beim Tropfen einen Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut.

Der Flasche können 10 ml Lösung entnommen werden; dies entspricht etwa 300 Tropfen. Aus produktions-technischen Gründen bleibt stets ein kleiner Flüssigkeitsrest in der Flasche zurück.

Die Dauer der Anwendung von HYLO® FRESH ist nicht beschränkt. Mit dem Inhalt einer Flasche HYLO® FRESH sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Augentropfen sollte ein Anwendungsabstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. HYLO® FRESH sollte dann immer zuletzt verabreicht werden. Augenallergien sollten in jedem Fall nach HYLO® FRESH in den Bindehautsack eingegeben werden.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind HYLO® FRESH Augentropfen auch bei langdauernder Anwendung, besonders gut verträglich. In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen (Brennen, Tränenfluss) berichtet, die nach Absetzen von HYLO® FRESH direkt abklingen.

Wir empfehlen nach dem Einsetzen von Kontaktlinsen mit der Anwendung der Augentropfen etwa 30 Minuten zu warten, um mögliche Unverträglichkeitsreaktionen zu vermeiden, die aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Kontaktlinsenpflegemitteln und HYLO® FRESH möglich sind.

HYLO® FRESH kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse auch bei Kindern, sowie von schwangeren und stillenden Frauen angewandt werden.

Wie oft und wie lange sollte man HYLO® FRESH anwenden?

HYLO® FRESH sollte individuell nach Ihrer Befindlichkeit dosiert werden. Im Allgemeinen tropfen Sie 3-mal täglich 1 Tropfen HYLO® FRESH in den Bindehautsack jedes Auges. Bei stärkeren Beschwerden kann HYLO® FRESH öfters am Tag getropft werden. Sollten Sie HYLO® FRESH häufiger (z. B. mehr als 10-mal täglich) anwenden, lassen Sie Ihre Augen von Ihrem Augenarzt untersuchen.

HYLO® FRESH ist für eine Dauernutzung geeignet, allerdings sollten Sie - wie bei allen Erkrankungen - bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Wann sollte man HYLO® FRESH nicht anwenden?

HYLO® FRESH sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile angewandt werden.

Welche Hinweise zur Aufbewahrung von HYLO® FRESH sind zu beachten?

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch einer Flasche ist HYLO® FRESH 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfallsdatums (☞) nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

10 ml Augentropfen

Stand der Information: Mai 2017

Hersteller (☞):

URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Deutschland

Vertrieb Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken

Tel: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88

E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Vertrieb Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H., A-3400 Klosterneuburg

Tel: +43 676/842 799 100, Fax: +43 125 330 339 113

E-Mail: info@ursapharm.at



0197

STERILE A

Das Kennzeichen zu unserem Produkt ist aus wichtig! Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +43 6805/9292-222) oder via www.ursapharm.de Ihre Fragen zu hören.