

Kamillosan® Ocean

Nasendusche



Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Kamillosan® Ocean Nasendusche jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Was in dieser Gebrauchsanweisung steht

1. Warum ist eine gute tägliche Nasenpflege wichtig?
2. Was ist Kamillosan® Ocean Nasendusche und wofür wird es angewendet?
3. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kamillosan® Ocean Nasendusche beachten?
4. Wie ist Kamillosan® Ocean Nasendusche anzuwenden?
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie ist Kamillosan® Ocean Nasendusche aufzubewahren?
7. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Kamillosan® Ocean Nasendusche

Kamillosan® Ocean Nasendusche enthält isotoniertes Meerwasser mit natürlichen Meersalzen, gereinigtes Wasser sowie Kamillenextrakt. Der Salzgehalt wurde so angepasst, dass Kamillosan® Ocean Nasendusche auf der Schleimhaut besonders gut verträglich ist. Milder Kamillenextrakt rundet die Rezeptur geruchlich ab. Kamillosan® Ocean Nasendusche erleichtert die Regeneration der empfindlichen Nasenschleimhaut.

Kamillosan® Ocean Nasendusche ist frei von Konservierungsstoffen.

1. Warum ist eine gute tägliche Nasenpflege wichtig?

Verkrustungen und Ablagerungen (z. B. getrockneter und zäher Schleim) können die Schleimhaut der Nase belasten und die oberen Atemwege verstopfen. Dank Kamillosan® Ocean Nasendusche ist eine wirksame Reinigung der Nase möglich. So werden Schleim, Krankheitserreger, Schmutz und Pollen aus der Nase gespült und die Schleimhäute gleichzeitig befeuchtet.

2. Was ist Kamillosan® Ocean Nasendusche und wofür wird es angewendet?

Kamillosan® Ocean Nasendusche ist ein Spray zum Einsprühen in die Nase.

Kamillosan® Ocean Nasendusche befeuchtet effektiv die Nasenhöhlen, Nasennebenhöhlen und die empfindliche Nasenschleimhaut.

Kamillosan® Ocean Nasendusche ist geeignet für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene.

Es wird angewendet:

- Als begleitende und vorbeugende Maßnahme bei Erkältungskrankheiten (z. B. verstopfte Nase).
- Zur effektiven Reinigung und Spülung der Nasenhöhlen bei vermehrter Belastung mit Krusten, Hausstaub, Pollen usw.
- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut z. B. bei trockener Luft wie in geheizten oder klimatisierten Räumen.

3. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kamillosan® Ocean Nasendusche beachten?

Gegenanzeigen

Kamillosan® Ocean Nasendusche darf aufgrund des Zusatzes von Kamillenextrakt nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Korbblütlern wie z. B. Arnika, Kamille, Ringelblume und Schafgarbe sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Anwendung von Kamillosan® Ocean Nasendusche während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es sind keine bekannt.

4. Wie ist Kamillosan® Ocean Nasendusche anzuwenden?

Wenden Sie Kamillosan® Ocean Nasendusche immer genau nach der Anweisung in dieser

Gebrauchsanweisung an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.



Dosierung:

Reinigung: Sprühstrahl einige Sekunden in jedes Nasenloch einsprühen. Je nach Bedarf Nase 2–3-mal täglich mit Kamillosan® Ocean Nasendusche reinigend.

Befeuchtung: Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen.

Bei Kindern sollte die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgen.

Anwendung:

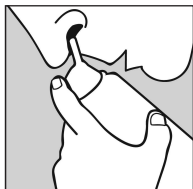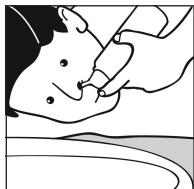

Den Kopf über das Waschbecken halten und leicht nach vorne neigen sowie seitlich drehen. Sprühöffnung in das obere Nasenloch einführen und Sprühkopf so lange wie erforderlich betätigen.

Anschließend den Kopf auf die andere Seite drehen und Sprühvorgang am anderen Nasenloch durchführen.

Danach Nase schnäuzen oder abwischen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen sollte jede Nasendusche nur von einer Person benutzt werden. Nach jeder Anwendung sollte die Sprühdüse abgespült und trocken gehalten werden.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem Schnupfenspray sollten Sie Kamillosan® Ocean Nasendusche vorher anwenden.

Hinweis zur Anwendung:

Die Dauer der Anwendung von Kamillosan® Ocean Nasendusche ist zeitlich nicht begrenzt. Die Anwendungsempfehlung entnehmen Sie den Abbildungen.

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Häufigkeit nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Überempfindlichkeitsreaktionen.

6. Wie ist Kamillosan® Ocean Nasendusche aufzubewahren?

Sie dürfen Kamillosan® Ocean Nasendusche nach dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Achtung

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

7. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Zusammensetzung:

Enthält isotonisiertes Meerwasser mit natürlichen Meersalzen, gereinigtes Wasser sowie Kamillenextrakt.

Kamillosan® Ocean Nasendusche ist in einer Packung mit 100 ml Lösung erhältlich.



MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Tel: +49 6172 888-01
Fax: +49 6172 888-2740

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2015.

