

# Kühlgel Mini Kompresse

**kalt / warm**

**8 x 13cm**

**Zur Kältebehandlung von Sportverletzungen, Zahnschmerzen, Migräne, Insektenstichen, Fieber und vieles mehr!**

Anwendung als Kaltkomresse:

Vor dem Gebrauch Kompresse ca. 2 Stunden in das Gefrierfach legen, in ein dünnes Tuch einschlagen und auf die schmerzende Stelle legen.

**Zur Wärmebehandlung von Muskelverspannungen, Muskelkater, Hexenschuß, Halsschmerzen, Blutergüssen und vieles mehr!**

Anwendung als Wärmekomresse:

Vor dem Gebrauch Kompresse ca. 8 Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser legen, in ein dünnes Tuch einschlagen und auf die schmerzende Stelle legen.

Artikeleigenschaften:

- Gleichmäßige Kälte- / Wärmeverteilung
- Äußerste Flexibilität bei Temperaturen bis -18°C
- Mehrfach wiederverwendbar

PZN 04764734