



Produkt einzigartiges Nasenspülsystem mit patentierter Salzrezeptur zur Herstellung einer isotonischen Lösung zur einfachen, effektiven und sicheren Nasenreinigung/-pflege

Status Medizinprodukt Klasse 1

Anwendungs-

Bereiche Erkältungskrankheiten,
Nasennebenhöhlenentzündungen,
Allergien/Heuschnupfen
gereizte, trockene, verstopfte Nase
rauchige oder staubige Umgebung

Bestandteile - Nasendusche mit benutzerkonformer Flaschenspitze
- Dosierbeutel mit 2,4g Natriumchlorid und Natriumbicarbonat

Gebrauchs-
anweisung

Befüllung der Druckflasche bis zum Strich mit 240ml körperwarmem Wasser, Inhalt eines Dosierbeutels hinzufügen und darin auflösen
über Waschbecken: Flaschenspitze im Wechsel unter ein Nasenloch halten, Flasche vorsichtig drücken, Salzwasser spült die Nase und fließt aus anderem Nasenloch ab

Anwendungs-

Häufigkeit bei Bedarf ein- bis zweimal täglich Nase spülen

Packungs-

Versionen **Nasendusche mit 10 Salzbeuteln**
PZN 15297253 - AVP 14,95 €



Nasendusche mit 60 Salzbeuteln

PZN 15297276 - AVP 24,95 €



Nachfüllpack mit 60 Salzbeuteln

PZN 15297282 - AVP 12,95 €



- Vorteile**
- einzigartiges, bereits in über 30 Ländern bewährtes Nasenspülsystem
 - schnelle, einfache Zubereitung der Salzlösung
 - effektive, angenehme Anwendung
 - ausgewogener, physiologischer pH-Wert
 - Ohne Zusatz-/Konservierungsstoffe/Fließregulierungsmittel/...
 - kein Brennen oder Stechen durch patentierte Salzkombination
 - leichte Reinigung der Flasche
 - für Kinder und Erwachsene geeignet

Einfach! - Schnell! - Wirksam! - Sanft!

Vertrieb **NeilMed Pharma GmbH**
Werdauer Straße 162
08060 Zwickau
Telefon: 0375 – 2118 6236
Telefax: 0375 – 2118 6238
E-Mail: info.de@neilmed.com
www.neilmed.com

Stand August 2020