



atmungsaktiv

20 Stück
je Beutel

Ladies exklusiv

PARAM Inkontinenz-Einlagen

NEU
Bestellen Sie jetzt
Ihren Musterpack

Ladies
normal

PZN - 15742753
ca. 28 x 10,5 cm



Ladies
extra

PZN - 15742977
ca. 35 x 12 cm



Ladies
extra plus

PZN - 15742983
ca. 38 x 12 cm



Ladies
maxi

PZN - 15743014
ca. 40,3 x 14 cm



Ladies
super

PZN - 15743037
ca. 41 x 20 cm



Ladies
Musterpack

PZN - 05466750



CE Medizinprodukt
Medical device



EXKLUSIV



Ladies exklusiv

PARAM Inkontinenz-Einlagen

Hoher Tragekomfort
bei absoluter Diskretion.

PARAM EXKLUSIV Ladies Einlagen sind die sicheren Begleiter für den Tag bei leichter bis mittlerer Blasen-schwäche. PARAM EXKLUSIV Ladies Einlagen sind besonders dünn und dennoch absolut sicher. Sie sind mit einer anti-bakteriellen, ph-neutralen Verteilerauf-lage ausgestattet, die für eine schnelle Aufnahme von Flüssigkeiten konzipiert worden ist. Das extrem starke Saugkissen verhindert gleichzeitig die Rücknässung.

Die weiche Oberfläche, die sehr weichen, elastischen Bündchen und seine atmungsaktive, raschelarme Außenseite sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und schützen die Haut vor Hautirritationen. Besondere Komponenten (Super-Absorber) schließen die Feuch-tigkeit im Kern des Produktes ein und neutralisieren eventuell auftretende Gerüche sicher. Ein durchgehend breiter Klebestreifen sorgt für den optimalen Sitz der Inkontinenz-Einlagen.




Leistungsstark
in Sauggeschwindigkeit
und Volumen




Hoher Komfort
sehr weiche,
elastische Bündchen



Mehr Sicherheit
durch zuverlässige
Geruchsneutralisierung

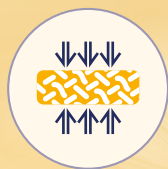

Sehr hautfreundlich
atmungsaktiv, mit
ph-neutralem Innenvlies

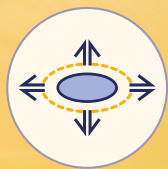

Erhältlich in:
Normal, Extra,
Extra plus, Maxi, Super

NEU
Jetzt bestellen:

PARAM Hotline
040-538 997 0

Anlegetechnik

So einfach ist das Anlegen
von PARAM Inkontinenz-
Einlagen.



1. Schutzfolie vom Klebestreifen
auf der Einlagenrückseite
abziehen, Einlage in der Länge
falten, um eine Schalenform
zu erhalten.



2. Einlage mit der
Klebeseite nach unten
in die Hose legen.



3. Hose hochziehen
und fixieren. Kontrollieren
Sie abschließend noch
einmal die Passform.



Param GmbH
Bei der Neuen Münze 20
22145 Hamburg
GERMANY

040 - 538 997 0
param@param.de
www.param.de

EXKLUSIV

