



Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!



Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Pulver

Extra Stark

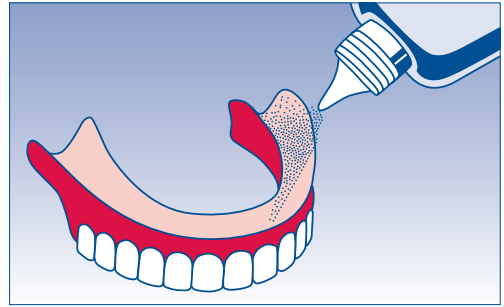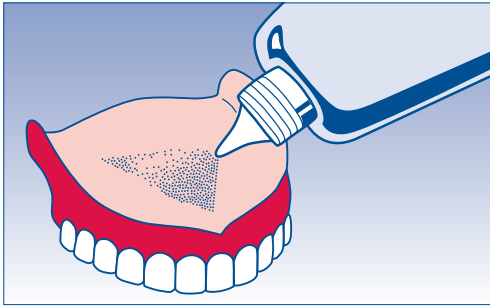

Anwendungsgebiet

Pulver als Haftmittel für Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung

Protefix® Haft-Pulver gleichmäßig dünn auf die angefeuchtete Prothese streuen. Die Gebissplatte sitzt nach dem Einsetzen sofort fest und haftet viele Stunden sicher im Mund. Sollte vorzeitig Lockerung eintreten – etwa durch Genuss von viel Flüssigkeit – so genügt es, **Protefix®** Haft-Pulver dünn nachzustreuen. Die Prothese sitzt sofort wieder fest.

Etwaige Rückstände lassen sich leicht mit Hilfe einer Zahnbürste unter fließendem Wasser von der Prothese abspülen. Besonders hartnäckige Haftmittelrückstände können mit einem speise-ölgetränkten Wattebausch entfernt werden.

Zur Vermeidung einer zu großen Ausstoßmenge bitte die Flasche nicht zusammendrücken.

Flasche schräg halten und leicht mit dem Zeigefinger antippen. Ein genaues Dosieren ist so möglich. Durch das Auftragen von zu viel Haftpulver kann sich dieses verhärtend, wodurch das Risiko einer Mundschleimhautschädigung erhöht wird.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Pulver enthält: Natriumalginat

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder des Gesamtorganismus beobachtet worden.

Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Zahnarzt auf.

Hinweise:

Die Anwendung von **Protefix®** Haft-Pulver sollte nur zeitweilig erfolgen. Eine anhaltend schlechte Haftung der Prothese ohne Haftpulver kann auf Abweichungen in ihrer Passgenauigkeit und Funktion zurückzuführen sein. In diesem Fall sollte der Arzt aufgesucht werden.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen. Bitte klären Sie dies mit Ihrem Zahnarzt ab.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 09/2010

Vertrieb in der Schweiz:
Biomed AG
Überlandstr. 199
CH-8600 Dübendorf


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.queisser.de

Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie **Protefix®** Haft-Pulver?

- mich überzeugt die Produktleistung
 andere Marken haben mich enttäuscht
 ich probiere **Protefix® Haft-Pulver Extra-Stark** gerade aus

Sind Sie mit der Haftkraft zufrieden?

- Ja Nein, weil _____

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 Nein

Ich bin _____ Jahre alt und verwende
Protefix® Haft-Pulver Extra-Stark seit _____

Ihre persönlichen Daten

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser Pharma GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: www.protefix.de oder E-mail: info@queisser.de.



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

Dafür gibt es **Protefix®** Wund- und Schutzgel.

Das Medizinprodukt **Protefix®** Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnsparingen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem einzigartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnsparange oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.
- Ohne Alkohol.



Protefix® Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN 2 651 753.