

# Ritex

## Gleitmittel Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft



CE 0297

### **GEL+** Gleitgel mit Aloe Vera – dem Plus an Pflege!

Ritex GEL+ ist pH-hautneutral und frei von Farb- und Duftstoffen. Es spendet der Haut zusätzlich Feuchtigkeit und Pflege.



### **HYDRO** Sensitiv Gel

Das feuchtigkeitsspendende Gleitgel ist frei von Konservierungsstoffen und speziell auf den pH-Wert der vaginal-Schleimhaut abgestimmt.

**GYNÄKOLOGISCH  
GETESTET\***



### **Passion** Gleitgel Leidenschaft pur!

Der erotische Duft der Passionsfrucht verführt die Sinne – samtweiche Massage-Perlen streicheln zart die Haut. Ein unvergleichlich sinnliches Erlebnis.



### **LongTime PLUS** Medizinisches Gleit- & Massage-Silikonöl

Das Gleit- und Massageöl ist extra lange gleitfähig. Regelmäßige Anwendung hält die Haut zart und geschmeidig.



### **BIO** Gleitgel Vegan und tierversuchsfrei!

Ritex BIO Gleitgel wird aus veganen Rohstoffen bester Qualität hergestellt. Es ist frei von Duft- und Farbstoffen, PEG, Parabenen und anderen Konservierungsstoffen. Schützt die empfindlichen Schleimhäute auf natürliche Weise.

**RITEX QUALITÄTSVERSPRECHEN**

Dermatologisch getestet · sehr gut hautverträglich

CE



## Gleitmittel Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft

### **Erotik unbeschwert genießen**

Ritex Gleitmittel sind Medizinprodukte zur Anwendung als Gleit- und Massage-mittel im Intimbereich. Sie ergänzen die körpereigene Lubrikation, unterstützen die natürliche Gleitfähigkeit und erhöhen so das Lustempfinden.

### **Beste Qualität – Sehr gute Verträglichkeit**

Ritex Gleitmittel enthalten ausgewählte Rohstoffe bester Qualität. Ihre Hautverträglichkeit wurde von einem unabhängigen, anerkannten Institut in umfangreichen klinischen Tests\* mit „Sehr Gut!“ bewertet.

### **Gleitmittel und Kondome**

Ritex Gleitmittel können mit allen Ritex Kondomen verwendet werden. Einfach außen auf das bereits angelegte Kondom auftragen.

### **Hergestellt in Deutschland**

Ritex Gleitmittel werden mit modernster Technologie in Deutschland hergestellt und unterliegen regelmäßigen, strengen Qualitätskontrollen.



zur Verfügung gestellt von [gebrauch.info](http://gebrauch.info)

### **Gleitmittel-Gebrauchshinweise:**

Ritex Gleitmittel werden auf den Scheideneingang und/oder den Penis aufgetragen und können beliebig oft angewandt werden.

Bei Kondomverwendung dürfen die Gleitmittel nicht direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms aufgetragen werden, da sich hierdurch das Risiko erhöht, dass das Kondom abrutscht oder reißt.

Sollten Unverträglichkeiten bei der Anwendung von Ritex Gleitmitteln auftreten oder generell mangelnde Lubrikation vorliegen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gleitmittel können die Chance einer Befruchtung reduzieren. Wenn Sie schwanger werden wollen, empfehlen wir deshalb Ritex Kinderwunsch Gleitmittel.

Halbbarkeitsdatum (solange Tube ungeöffnet) und LOT Nr. siehe Boden der Faltschachtel und Tubenzfalz.

### **Ingredients (INCI):**

#### **BIO Gleitgel:**

Glycerin, Aqua, Xanthan Gum, Lactic Acid

#### **GEL+:**

Aqua, Aloe Barbadensis, Glycerin, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid

#### **HYDRO Sensitiv Gel:**

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid

### **Passion:**

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Lactose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Microcrystalline Cellulose, Parfum, Tocopheryl Acetate, C.I. 77492

### **LongTime PLUS:**

Dimethicone

### **Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:**



Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.



Produkt zwischen 0° C und 30° C lagern.



Geöffnete Tube innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.



Verfalldatum. Produkt nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.



Nummer der Produktcharge



Ritex Artikelnummer



Hersteller



Ritex GmbH  
Gustav-Winkler-Straße 50  
D-33699 Bielefeld · Germany

ritex@ritex.de

\*Mehr Infos unter: [www.ritex.de](http://www.ritex.de)

