

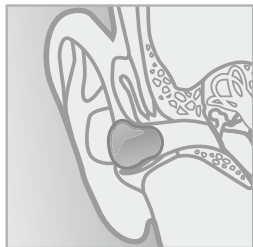
D Gebrauchsinformationen**SANOHRA silicon**

Das hautfreundliche medizinische Silikon ist besonders weich und lässt sich optimal verformen. In die Ohrmuschel eingelegt, passt es sich sanft an und deckt den Gehörgang schützend ab, ohne störendes Druckgefühl.

SANOHRA silicon schützt vor unangenehmen Geräuschen und sorgt für einen angenehmen Schlaf oder konzentriertes Arbeiten. **SANOHRA silicon** verhindert das Eindringen von Wasser in den Gehörgang und schützt das empfindliche Ohr vor Zugluft.

Gebrauchsanleitung

1. Kneten Sie das Siliconkissen **mit sauberen Händen** kräftig durch und formen Sie eine runde Kugel. Keine längliche Form.
2. Einzelne Kissen nicht teilen!
3. Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres während des Einsetzens leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet.
4. Platzieren Sie die Kugel in der Ohrmuschel über der Öffnung des Gehörganges.
5. Die Kugel leicht andrücken, so dass der Gehörgang gut abgedichtet wird und passgenau und sicher sitzt.
6. Die Ohrmuschel wieder loslassen.
7. Nach Gebrauch vorsichtig entfernen, ohne ruckartige Bewegungen.
8. Aus hygienischen Gründen wird nur eine einmalige Verwendung empfohlen.

**Daten der Dämmwirkung**

SNR = 24 db		
H=27 db	M=20 db	L=18 db

Model: Bio – PA -02
89/686/CE (EN 352-2)

Nicht zum Tauchen verwenden! Der Wasserdruck in größerer Tiefe würde die Siliconkugel weiter in den Gehörgang drücken (Nicht mehr als 1 Meter Wassertiefe). Beim Springen ins Wasser oder durch heftige Bewegungen kann der Ohrenschutz verloren gehen!

Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzen. Bei Entzündungen des Ohres, Verletzungen des Trommelfells oder dem Einsatz eines Paukenröhrchen fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.

Weitere Produkte der Innosan GmbH:**SANOHRA fly Ohrenschutz beim Fliegen**

mit speziellem Filter der das Ohr vor den Luftdruckschwankungen bei Start und Landung schützt. www.sanohra.de

SANOHRA swim Ohrenschutz beim Schwimmen, Baden und Duschen

Schützt den Gehörgang und das Trommelfell vor dem Eindringen von Wasser.

ProBrise® mehr Luft zum Atmen

Nasendilatator der die Nasenflügel abstützt und leicht spreizt. Für leichteres Atmen beim Sport und gegen Schnarchen. www.probrise.de