

# Solofix® Safety – So einfach. So sicher.

Sterile Einmallanzette zur Kapillarblutentnahme mit automatischem Sicherheitsmechanismus

## Einfache Handhabung

- Vorgespannter Sicherheitsmechanismus
- Definierter Blutfluss durch automatische Kontaktaktivierung
- Gleich bleibender Punktionserfolg durch standardisierte Einstichtiefe
- Automatischer irreversibler Nadelrückzug

## Hoher Patientenkomfort

- Geringer Schmerz und minimale Gewebeverletzung durch präzise linear geführte Lanzette sowie schnellen Punktions- und Rückzugsmechanismus



## Erfüllt die TRBA 250

- Vermeidung von Nadelstichverletzungen: Die Nadel ist vor und nach der Punktion sicher im Gehäuse eingeschlossen – eine Wiederverwendung ist ausgeschlossen

## Und so funktioniert's

1. Grüne Sterilkappe abdrehen und herausziehen
2. Lanzette auf gewünschte Einstichstelle setzen, Mechanismus durch leichten Druck aktivieren – deutlich hörbar durch ein Klick
3. Blutprobe wie gewohnt aufnehmen

Weitere Informationen zur TRBA 250 und den B. Braun Sicherheitsprodukten finden Sie auf unserer Website:  
[www.sicherheitsprodukte.bbraun.de](http://www.sicherheitsprodukte.bbraun.de)

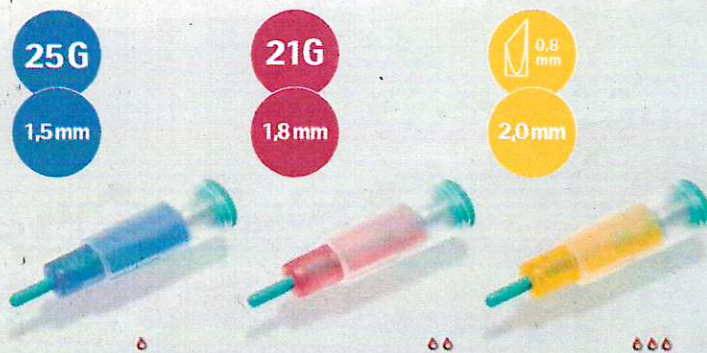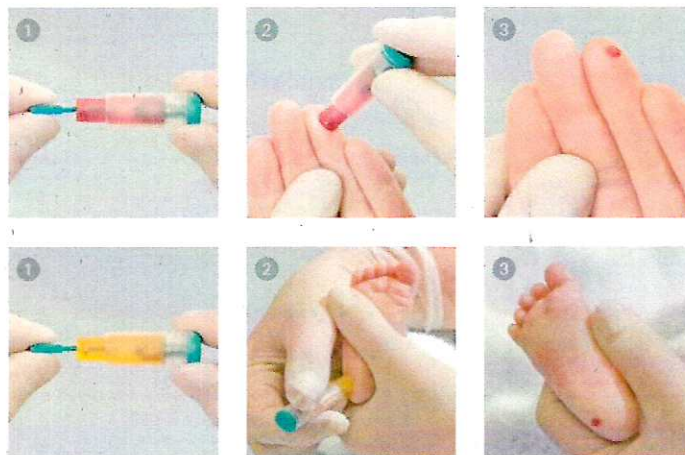

**Solofix® Safety Fine**  
 Geringer Blutfluss – z.B. zur Blutzuckermessung

**Solofix® Safety Universal**  
 Mittlerer Blutfluss – allgemeine Blutdiagnose

**Solofix® Safety Neonat**  
 Hoher Blutfluss – Fersenapplikation bei Neugeborenen, Fingerblutentnahme bei Erwachsenen

Größe	25G	21G	0,8 mm Klinge
Punktionstiefe	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm
Blutprobe	< 10 µl	10 – 30 µl	70 – 100 µl
VE (Stück/Pack.)	200	200	200
REF	6183010	6183000	6183020
PZN	9042230	1119660	9042247