

# Meerwasser Nasenspray

PZN 11369872

## Medizinprodukt mit natürlichem Meersalz

Medizinprodukt

Inhalt: 20 ml

### Informationen

Meerwasser Nasenspray wirkt befeuchtend und reinigend auf die Nasenschleimhaut. Es beugt der sogenannten „Trockenen Nase“ vor. Besonders bei vermehrter Belastung durch Pollen und Staub ist eine Befeuchtung der Nasenschleimhaut wichtig.

### Zusammensetzung

1 ml Lösung enthält: 1 ml isotonische Meersalzlösung entsprechend einer 0,9 %-igen Natriumchloridlösung.

Meerwasser Nasenspray wird angewendet:

- zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle bei trockener und verstopfter Nase (z. B. als begleitende Maßnahme bei der Behandlung von Schnupfen)
- zur Reinigung der Nasenhöhle (z. B. bei Luftbelastung durch Pollen, Staub etc.)
- zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut (bei geringer Luftfeuchtigkeit z. B. in klimatisierten Räumen)

Es eignet sich bestens zur Unterstützung der Behandlung von Schnupfen und spendet der Nasenschleimhaut Feuchtigkeit. Durch die natürlichen im Meersalz enthaltenen Mineralstoffe erleichtert das Nasenspray die Regeneration der Schleimhaut. Nur eine intakte Nasenschleimhaut kann ihre wichtige Schutz- und Reinigungsfunktion vollständig erfüllen.

Dadurch wird das Wohlbefinden nachhaltig verbessert und Sie können wieder aufatmen. Durch ein spezielles APF-Pumpsystem ohne Rückverkeimung. In praktischer Pump-Sprühflasche, einfach zu handhaben.

Frei von Konservierungsstoffen und Alkohol.

**Hinweis:** Mit speziellem APF-Filtersystem ohne Rückverkeimung. Ohne Konservierungsmittel, ohne Treibgas, ohne Polyethylenglycol (PEG).

**Darreichungsform und Inhalt:** Dosierspray mit 20 ml isotonischer Meersalzlösung zum Einsprühen in die Nase und Spülen der Nase.

**Anwendungsgebiete:** Wann wird Meerwasser Nasenspray angewendet? Durch seinen feinen Sprühnebel ist Meerwasser Nasenspray eine sanfte Hilfe für die Nasenhöhlen, Nasennebenhöhlen und die empfindliche Nasenschleimhaut.

**Gegenanzeigen:** Wann dürfen Sie Meerwasser Nasenspray nicht anwenden? Nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.  
Darf Meerwasser Nasenspray in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden? Es bestehen keine Bedenken gegen die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.



**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Nebenwirkungen:** Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Meerwasser Nasenspray anwenden? Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene: Je nach Bedarf sprühen Kinder (ab 2 Jahren) und Erwachsene mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße Meerwasser Nasenspray in jedes Nasenloch.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem anderen Schnupfenspray sollten Sie Meerwasser Nasenspray vorher anwenden.

Wie lange sollten Sie Meerwasser Nasenspray anwenden? Bei Bedarf kann Meerwasser Nasenspray bis zum Abklingen der Beschwerden angewandt werden.

**Hinweis zur Anwendung:** Trotz des neuartigen Spraysystems mit eingebautem Filter empfehlen wir aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen jede Dosiereinheit nur von einer Person zu benutzen. Nach der Anwendung empfiehlt es sich daher auch, den Nasenadapter abzuwischen und trocken zu halten. Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis. Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion dieses Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Dosiereinheit keine Manipulation vorgenommen werden. Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge berücksichtigt.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:** Meerwasser Nasenspray darf nur bis zu dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel mit „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Nach Anbruch sollten Sie Meerwasser Nasenspray trotz des neuartigen Filtersystems nicht länger als 6 Wochen anwenden.

#### **Wichtige Hinweise**

Bei Nasenverletzungen bzw. nach Nasenoperationen sollten Sie vor der Anwendung des Meerwasser Nasensprays Ihren Arzt befragen. Aus hygienischen Gründen sollte das Meerwasser Nasenspray nur von einer Person verwendet werden. Das Meerwasser Nasenspray sollte nicht gleichzeitig mit Schnupfenmitteln (z. B. mit Schleimhaut - abschwellender Wirkung) verwendet werden. Auf einen ausreichenden Zeitabstand zwischen den jeweiligen Anwendungen ist zu achten!

**Meerwasser Nasenspray für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

**Beachten Sie die vollständigen Anweisungen und Gegenanzeigen in der Gebrauchsanweisung, die auf dem Päckchen aufgedruckt ist und überwachen Sie die Anwendung regelmäßig.**