




Lohmann & Rauscher

Suprasorb® C

Kollagen-Wundverband

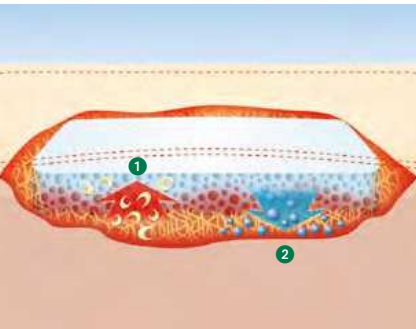

- 1 schnelle Exsudataufnahme und Gelbildung; wundheilungshemmende Faktoren werden im Verband gebunden
- 2 zugeführtes Kollagen aktiviert die Wundheilung und schützt Wachstumsfaktoren

Anwendungsbereiche

- zum Auflegen auf Wunden bei Verletzungen mit größeren oberflächlichen Gewebsdefekten, z. B.
 - Brandwunden
 - operativen Gewebsdefekten
 - Ulcera verschiedener Genese und Wundhöhlen, vor allem wenn nach Behandlung mit anderen Wundverbänden stagnierende Wundverhältnisse vorgefunden werden

Eigenschaften

- beschleunigt aktiv die Wundheilung
- bindet wundheilungshemmende Faktoren (z. B. Proteasen, Radikale, Zytokine)
- schützt Wachstumsfaktoren
- schnelle Exsudataufnahme durch ausgeprägte Porenstruktur

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- bei schwach exsudierenden Wunden empfiehlt es sich, Suprasorb C mit NaCl oder Ringlösung anzufeuchten

Tipps

- kann mit folgenden Sekundärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb X, Suprasorb P, Suprasorb H, Suprasorb F, Suprasorb G Amorphes Gel

Suprasorb® C Kollagen-Wundverband
steril, einzeln eingeschleibt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
4 x 6 x 0,8	20 481	043 313 0	5 / 225	EV
6 x 8 x 0,8	20 482	043 314 7	5 / 180	EV
8 x 12 x 0,8	20 483	043 315 3	5 / 90	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15