


# Suprasorb® F

## Folien-Wundverband

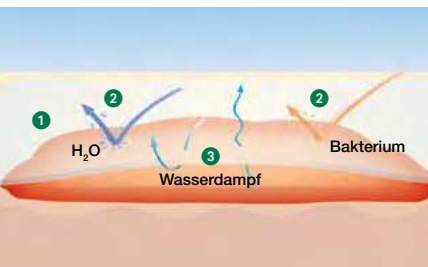

- 1 transparente Polyurethanfolie
- 2 bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- 3 überschüssiger Wasserdampf verdunstet

### Anwendungsbereiche

- schwach exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- Wunden in der Epithelisierungsphase, z. B.:
  - Ulzera verschiedener Genese
  - Verbrennungen 2. Grades
  - Spalthautentnahmestellen
  - postoperative Wunden
  - Abschürfungen

### Eigenschaften

- einfache Applikation
- hoher Tragekomfort durch sicheren und flexiblen Halt
- sehr gute Wundkontrolle
- effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen
- sehr gute Wundheilung durch hohe Atmungsaktivität
- Duschen ist möglich
- desinfektionsmittelbeständig (alkohol-, iod- und octenidinhaltige)

### Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Primärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden

### Ausführungen

- steriler, zugeschnittener Folienwundverband
- unsteriler Folienverband von der Rolle

### Tipps

- kann mit folgenden Primärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb A, Suprasorb X, Suprasorb X+PHMB, Suprasorb C und Suprasorb G

**Suprasorb® F** Folien-Wundverband  
steril, einzeln eingeschelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
5 x 7	20 460	043 299 8	10 / 380	SSB, EV
5 x 7	20 461	043 300 6	100 / 1000	SSB, EV
10 x 12	20 462	043 301 2	10 / 100	SSB, EV
10 x 12	20 463	043 302 9	50 / 200	SSB, EV
10 x 25	20 464	043 303 5	10 / 140	SSB, EV
15 x 20	20 465	043 304 1	10 / 400	SSB, EV
20 x 30	20 466	043 305 8	10 / 180	SSB, EV

**Suprasorb® F** Folien-Wundverband  
gerollt, unsteril

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10 x 1	20 467	180 624 8	1 / 16	SSB, EV
10 x 10	20 468	265 018 5	1 / 16	SSB, EV
15 x 10	20 469	265 019 1	1 / 10	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15