


# Suprasorb® P

## PU-Schaumverband

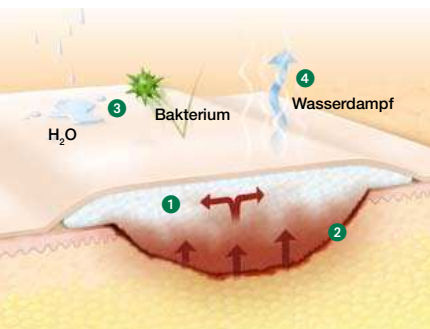

- 1 schnelle Exsudataufnahme
- 2 guter Wundgrund-Kontakt
- 3 bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- 4 überschüssiger Wasserdampf verdunstet

### Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
  - Dekubiti und andere Ulzera
  - Verbrennungen 2. Grades
  - Spalthautentnahmestellen
  - postoperative Wunden

### Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch gutes Exsudatmanagement
- hoher Tragekomfort durch weiche und anschmiegsame Struktur
- leichte Beurteilung des Wundexsudats
- bakterien- und flüssigkeitsabweisende PU-Membran

### Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und möglichem Primärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- bei Verfärbung über die Wundfläche hinaus
- kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden

### Ausführungen

- nicht klebend
- selbstklebend
- Sonderform sacrum

### Tipps

- kann mit folgenden Primärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb A, Suprasorb A+Ag, Suprasorb X, Suprasorb X+PHMB und Suprasorb C

**Suprasorb® P** PU-Schaumverband  
steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
<b>selbstklebend</b>				
7,5 x 7,5	121 907	740 236 8	8 / 100	SSB, EV
10 x 10	121 906	740 235 1	8 / 100	SSB, EV
15 x 15	20 418	187 628 9	5 / 50	SSB, EV
15 x 20	20 419	187 630 3	5 / 50	SSB, EV
<b>nicht klebend</b>				
5 x 5	20 405	187 635 5	10 / 100	SSB, EV
7,5 x 7,5	121 904	740 229 1	8 / 100	SSB, EV
10 x 10	121 905	740 234 5	8 / 100	SSB, EV
15 x 15	20 408	187 642 1	5 / 50	SSB, EV
15 x 20	20 409	187 643 8	5 / 50	SSB, EV
<b>sacrum, selbstklebend</b>				
18 x 20,5	20 415	475 909 3	5 / 50	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15