

Thealoz® Duo UD

**Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
vor der Anwendung.
Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf,
da Sie sie vielleicht später noch einmal
lesen möchten.**

ANWENDUNGSGEBIETE

THEALOZ DUO UD wird zum Schutz, zur Befeuchtung und zur Benetzung des Auges bei der Behandlung von moderaten bis schweren Symptomen trockener Augen angewendet.

Nur zur Anwendung am Auge.

GEEIGNET FÜR

- Erwachsene,
- Kinder: Die Eltern oder eine betreuende Person sollten das Produkt verabreichen,
- Schwangere oder stillende Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand,
- Träger aller Arten von Kontaktlinsen.

GEGENANZEIGEN

Nicht injizieren oder einnehmen.

Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von THEALOZ DUO UD sind (siehe Produktbeschreibung).

PRODUKTBESCHREIBUNG

THEALOZ DUO UD ist eine Lösung zur Anwendung am Auge bestehend aus Trehalose (3%), Natriumhyaluronat (0,15%), Natriumchlorid, Trometamol, HCl und Wasser für Injektionszwecke.

THEALOZ DUO UD ist eine sterile, phosphatfreie, hypotone und pH-neutrale Lösung.

THEALOZ DUO UD ist schonend für die Augen, da es frei von Konservierungsmitteln ist. Da keine Konservierungsmittel enthalten sind, wird das Augengewebe geschützt und das Produkt ist auch für Anwender gut verträglich, die empfindlich auf Konservierungsmittel reagieren.

NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

THEALOZ DUO UD wird bei Beschwerden, Stechen, Fremdkörpergefühl oder Reizungen des Auges aufgrund von moderater und starker Augentrockenheit empfohlen.

Diese Symptome können durch äußere Einflüsse wie Wind, Rauch, Luftverschmutzung, Staub, Sonne oder Kälte, trockene Hitze, Klimaanlage, Flugreisen und langes Arbeiten vor dem Computerbildschirm und Augenoperationen wie refraktive Eingriffe (Laserbehandlungen) und Katarakt (Grauer Star)-Operationen verursacht werden.

THEALOZ DUO UD bietet sofortigen Komfort, der den ganzen Tag lang anhält sowie Linderung der oben beschriebenen Symptome trockener Augen.

THEALOZ DUO UD ist für die empfindliche Augenoberfläche und für Träger aller Arten von Kontaktlinsen geeignet.

Die Hauptbestandteile von THEALOZ DUO UD sind Trehalose und Natriumhyaluronat.

Trehalose ist eine natürliche Substanz in vielen Pflanzen und Tieren, die auch unter extrem trockenen Bedingungen überleben können. Sie bietet schützende und befeuchtende Eigenschaften.

Natriumhyaluronat, das natürlicherweise im menschlichen Auge vorkommt, ist wasserbindend und führt zur Befeuchtung und Benetzung der Augenoberfläche. Es bewirkt, dass die Lösung auf der Augenoberfläche verbleibt, sorgt für eine lang anhaltende Linderung und verkürzt die Heilungsdauer der Augenoberfläche.

Die besondere Kombination von Trehalose und Natriumhyaluronat in THEALOZ DUO UD bietet langanhaltenden Schutz, Befeuchtung und Benetzung der Augenoberfläche.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dosierung: 1 Tropfen in jedes Auge, 4- bis 6-mal täglich

Für die Verwendung von THEALOZ DUO UD ist keine besondere Schulung erforderlich.

Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.

Öffnen Sie den Folienbeutel und trennen Sie das Einzeldosisbehältnis vom Streifen ab.

Legen Sie den Rest des Streifens zurück in den Beutel. Benutzen Sie keine Hilfsmittel, um das Einzeldosisbehältnis zu öffnen.

Drehen Sie das Einzeldosisbehältnis auf den Kopf und klopfen Sie leicht dagegen, bis sich die Lösung nach unten bewegt.

Öffnen Sie das Einzeldosisbehältnis, indem Sie die obere Lasche abdrehen.

Um eine Verunreinigung zu vermeiden, darf die Einzeldosisbehältnis-Spitze nicht berührt werden. Drücken Sie das Einzeldosisbehältnis, bis Sie die Lösung sehen können.

Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, schauen Sie nach oben und geben Sie einen Tropfen in den Bindehautsack. Schließen Sie das Auge sanft nach der Anwendung.

Verwerfen Sie das Einzeldosisbehältnis sofort nach der Anwendung, auch wenn noch etwas Lösung vorhanden ist. Bewahren Sie es nicht auf.

Verwerfen Sie das Einzeldosisbehältnis sofort nach der Anwendung, auch wenn noch etwas Lösung vorhanden ist. Bewahren Sie es nicht auf.



VORSICHTSMASSNAHMEN

Prüfen Sie die Verpackung vor dem ersten Gebrauch auf Unversehrtheit: verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Beutel und das Einzeldosisbehältnis ungeöffnet sind.

Um eine Verunreinigung zu vermeiden, darf die Einzeldosisbehältnis-Spitze nicht berührt werden.

Verwenden Sie das Einzeldosisbehältnis nicht wieder, da

der Inhalt nach dem Öffnen nicht mehr vor mikrobieller Verunreinigung geschützt ist.

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nicht verbessern, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.

WARNHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bedienen Sie nach der Anwendung keine Kraftfahrzeuge oder Maschinen, solange Ihre Sicht verschwommen ist: Warten Sie einige Minuten, bis Ihre Sicht wieder klar ist. Warten Sie mindestens 10 Minuten zwischen der Anwendung von zwei verschiedenen Augenprodukten. THEALOZ DUO UD niemals verdünnen oder mit anderen Lösungen mischen.

NEBENWIRKUNGEN

Die folgenden Nebenwirkungen wurden berichtet: in seltenen Fällen kann eine leichte Reizung und Rötung der Augen auftreten. In solchen Fällen sollten Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen entfernen.

Wenn Sie Augentropfen verwenden, könnten Sie für kurze Zeit störende Symptome wie Brennen, Stechen, Fremdkörpergefühl im Auge verspüren und verschwommen sehen.

Wenn Sie nach der Anwendung dieses Produkts Nebenwirkungen oder ungewöhnliche Empfindungen feststellen, wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal und teilen Sie die Informationen dem lokalen Vertrieb, dem Hersteller oder der zuständigen Gesundheitsbehörde mit (siehe Kontaktdaten am Ende der Gebrauchsanweisung).

AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Zwischen 8 °C und 30 °C lagern.

Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

Verwerfen Sie das Einzeldosisbehältnis unmittelbar nach der Anwendung, auch wenn noch etwas Lösung vorhanden ist.

Bewahren Sie die ungeöffneten Einzeldosisbehältnisse im Beutel auf, um sie vor Licht zu schützen.

Ungeöffnete Einzeldosisbehältnisse können bis zu drei Monate nach dem ersten Öffnen des Beutels verwendet werden.


Nach Ablauf des Verfallsdatums auf dem Einzeldosisbehältnis und der äußeren Verpackung das Produkt nicht mehr anwenden.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag eines Monats, sofern die Verpackung unbeschädigt ist und das Produkt korrekt gelagert wurde.

Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß der lokalen Leitlinien (die Einzeldosisbehältnisse und der Beutel sollten im Hausmüll entsorgt werden, der Umkarton und die Packungsbeilage sind recycelbar).

Erstellungsdatum und Version der Gebrauchsanweisung: Ver. 6 06/2022

Hersteller:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankreich

www.laboratoires-thea.com
Abschnitt « Contact us »

Vertrieb:



Théa Pharma GmbH, Schillerstraße 3, 10625 Berlin
Deutschland
www.theapharma.de
Tel.: 030 / 315 18 98-0

Gesundheitsbehörde:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Deutschland
www.bfarm.de

 0459

BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG

	Hersteller
	Fertigungslosnummer, Charge
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Achtung
	Vor Sonnenlicht schützen
	Trocken aufbewahren
	Artikelnummer
	eindeutige Produktidentifizierung

 **Thea**

