

tri.balance® pH-Teststreifen



zur Kontrolle des pH-Werts.

pH-Teststreifen – der Urintest für den Säure-Basen-Haushalt

Es gibt verschiedene Methoden, eine Übersäuerung festzustellen. Mit den tri.balance® pH-Teststreifen lässt sich der Wert im Urin bestimmen. Bei 7,4 liegt der pH-Wert im neutral-basischen Bereich. Zeigt der Teststreifen einen niedrigeren Wert an, ist der Säure-Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht geraten und der Körper übersäuert.

Wir empfehlen, den pH-Wert regelmäßig zu messen, um den Säure-Basen-Haushalt zu kontrollieren. Außerdem ist der Wert im Urin von verschiedenen Faktoren abhängig und schwankt tagsüber – je nachdem, wann man misst, ob man sich viel bewegt oder was man isst. Denn es gibt verschiedene Faktoren, die den Säure-Basen-Haushalt beeinflussen und sich direkt im Urintest widerspiegeln.

Produktmerkmale

- Messbereich auf den menschlichen pH-Wert im Urin abgestimmt
- Schnelle und einfache Anwendung
- Genaue und zuverlässige Messergebnisse
- Farbige Skala zum einfachen Ablesen des pH-Werts

Anwendung

Wer seinen pH-Wert testen möchte, taucht den Teststreifen etwa eine Sekunde in die Urinprobe ein, bis sich der Streifen verfärbt. Nach fünf Sekunden bis spätestens einer Minute kann man an der Farbskala vergleichen, welchen pH-Wert der Urin hat und ob der Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht ist.

Unser Tipp: Das aussagekräftigste Messergebnis erhalten Sie bei der Messung des ersten Morgenurins, da wir in der Nacht am wenigsten Speisen und Flüssigkeiten zu uns nehmen, welche den pH-Wert verschieben können.

Die maximalen Abweichungen von der Genauigkeitsgrenze sind +/- 0,2 pH.

PZN - Nummer: 07252236 / Inhalt: 99 St. / EAN: 4260101490056
PZN - Nummer: 11100101 / Inhalt: 22 St. / EAN: 4260101490070

Hersteller

tri.balance® base products
Herrenberg 7
89312 Günzburg
Deutschland

