

REFIT™

EIN PRAKTISCHER ZEMENT FÜR DAS VORÜBERGEHENDE BEFESTIGEN FESTSITZENDER ZAHNPROTHESEN (KRONEN, BRÜCKEN, VERBLENDUNGEN, GUSSFÜLLUNGEN & TEILKRONEN)

REFIT ist ideal für das vorübergehende Zementieren herausgefallener Kronen, Brücken, Verblendungen, Gußfüllungen und Teilkronen (festsitzende Prothesen), die normalerweise dauerhaft im Gebiß fixiert sind. Zur Anwendung bitte den nachstehenden Anweisungen folgen. Danach möglichst bald den Zahnarzt konsultieren. Vor dem Öffnen der Packung sollten zuerst die Zähne gründlich geputzt werden. Danach die herausgefallene Prothese gründlich waschen und reinigen und, falls erforderlich, trockene Zementreste mit einer Nadel von der Paßfläche der Prothese entfernen. Dann die Prothese auf den Zahn bzw. die Zähne aufsetzen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Prothese fest und bequem sitzt, und daß sie - auch bei geschlossenem Kiefer - nicht wackelt.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Eine Kapsel aus der Packung nehmen. Durch leichtes Antippen das Pulver in der größeren Kapselhälfte sammeln. Dann die Kapsel öffnen.
2. Ungefähr drei Tropfen Wasser aus dem Wasserhahn in die Kapselhälfte mit dem Pulver tropfen lassen.
3. Die Kapsel schnell wieder verschließen.
4. Die Kapsel zwischen Daumen und Mittelfinger halten und drei Sekunden lang schütteln.
5. Die Kapsel öffnen und das Zementgemisch auf die Paßfläche der Prothese aufbringen. Jetzt die Prothese wieder einsetzen und hin- und herbewegen, bis sie fest sitzt. Das Gebiß schließen, um zu überprüfen, ob die Prothese bequem sitzt. Falls dies nicht der Fall ist, die Prothese schnell entfernen und den Zementiervorgang wiederholen.
6. Nicht länger als 28 Tage verwenden.



Aufbewahrung: Nach Verwendung gut verschließen; Kühl und trocken aufbewahren. **Zusammensetzung** in g/100: Zinkoxid 64,93 g, Polyacrylsäure 22,00 g, Magnesiumoxid 13,00 g, Eisenoxid 0,07 g

HERSTELLER:
G.A.P. Research Company Ltd.,
Kent DA11 9DZ United Kingdom

DISTRIBUTOR:
Megadent

Deflogrip G. Reeg GmbH - 40211 Düsseldorf
www.megadent.de

